

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Ультрафиолетовый стерилизатор для инструмента LuazON используется для обработки маникюрно-педикюрных, парикмахерских и косметологических инструментов из любых материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- дезинфекция инструментов: ножниц, пилок, пинцетов, игл, боров, скальпелей, фрез, и т. п.;
- подходит для металлических, деревянных, пластиковых инструментов, а также инструментов, изготовленных из микрофибры, поролона и других материалов;
- возможность обработки нескольких инструментов одновременно;
- бактерицидное действие УФ-излучения;
- 2 отсека прибора для большей вместимости;
- допускается использование инструмента сразу после очистки;
- время стерилизации: 10–15 мин.;
- материал: гиппоаллергенный пластик;
- легкость эксплуатации и безопасность применения;
- мощность: 8 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: стерилизатор для инструмента, сетевой адаптер, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового и профессионального применения. Используйте прибор только по назначению.
- Прибор должен использоваться только в горизонтальном положении.
- Избегайте ударов и падений прибора. Это может привести к серьезным повреждениям и выходу прибора из строя.
- Во время работы прибора не подносите его близко к глазам на протяжении долгого времени. Интенсивное воздействие ультрафиолета может привести к ожогам кожи и сетчатки глаза.

- Регулярно проводите замену УФ-лампы. Не прилагайте механические усилия к стеклянной части лампы при установке или демонтаже.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
 - не накрывайте прибор;
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не используйте прибор во влажных местах;
 - не включайте прибор, если на его поверхности есть вода;
 - не вставляйте и не вынимайте шнур мокрыми руками;
 - не пользуйтесь прибором, если провод поврежден или мокрый;
 - не дергайте за шнур, если хотите отключить прибор, аккуратно вынимайте его из гнезда.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.
- Для полной дезинфекции инструментов избегайте прикасновений между приборами и наложения предметов друг на друга в отсеках для обработки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Включите прибор в сеть.
2. Для включения УФ-лампы для дезинфекции прибора, нажмите на кнопку включения.
3. Разложите приборы внутри отсеков так, чтобы инструменты не перекрывали друг друга. При выдвижении отсеков произойдет автоматическое отключение лампы с целью экономии электроэнергии.
4. После истечения 10–15 мин. инструмент будет полностью обработан и готов к использованию.
5. После дезинфекции инструментов выключите прибор, нажав на кнопку и отключив от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно протирайте прибор снаружи мягкой сухой тканью.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства.
- Для дезинфекции протрите корпус прибора спиртосодержащим средством.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не наматывайте шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.