



Массажная кушетка

SD-3277A



Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации

1. Общие сведения

Кушетка предназначена для проведения массажных и косметологических процедур.

2. Технические характеристики

Длина: 1830 мм

Ширина: 630 мм

Высота: 630 мм

Толщина мастраса: 75 мм

Масса нетто: 26 кг

Масса брутто: 36 кг

Допустимая нагрузка: 150 кг

Температура помещения при работе: от +5 до +40 °С

Температура хранения: от -5 до +40 °С

Относительная влажность: от 45 до 85%

3. Указание мер безопасности

Перед началом работы внимательно прочитайте паспорт и руководство по кушетки.

Кушетка должна находиться на ровной, твердой поверхности. Во время эксплуатации будьте внимательны при работе с острыми, колющими и режущими инструментами вблизи мягких частей кушетки, во избежание порезов.

Не оставляйте кушетку под прямыми солнечными лучами, при ярком свете или в условиях повышенной влажности, чтобы избежать повреждения.

4. Регулировка и настройка

1. Регулировка угла наклона спинки осуществляется механически.

2. Для подъема спинки просто поднимите ее в необходимое положение и отпустите - спинка зафиксирована. Чтобы опустить спинку вниз, придерживайте её рукой и приподнимите рычаг, находящийся под спинкой.

В кушетке предусмотрено отверстие для лица. Кушетка поставляется в частично разобранном виде.

5. Сборка

1. Освободите устройство от упаковочной пленки, проверьте комплектность поставки и убедитесь в отсутствии повреждений.

2. Соедините ножки с полкой.

3. Вставьте ножки с полкой в каркас кушетки.

6. Условия хранения

Передвижной массажный стол следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С, с относительной влажностью воздуха 80%.

7. Меры предосторожности

Не работайте во влажных и сырых помещениях. Строго избегайте контакта с заземленными частями, такими как трубы, радиаторы, электрические плиты, холодильники во время работы и при подключении прибора к сети.

8. Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации и хранения, перечисленных в настоящем паспорте.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня приобретения.
3. Изделия, имеющие механические повреждения или эксплуатировавшиеся с нарушением настоящего руководства, ремонту на условиях гарантии не подлежат.
4. Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в специальных уполномоченных сервисных службах. Доставка изделия в сервисную организацию для гарантийного или послегарантийного обслуживания осуществляется за счет владельца изделия.
5. Изделие принимается в гарантийный ремонт только при наличии документов, подтверждающих покупку и заполненным гарантийным талоном.