

Кресло косметологическое

***SD-3560***



*Паспорт изделия  
и руководство по эксплуатации*

**Уважаемый Покупатель,**

**поздравляем Вас с удачным приобретением!**

Для того чтобы, работа с косметологическим креслом SD-3560 была удобной, приятной и безопасной, просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

**Желаем успешной работы!**

**ВНИМАНИЕ!**

- Продавец не несет ответственности за возможные несчастные случаи или порчу оборудования, произошедшие при его неправильном использовании и несоблюдении руководства по эксплуатации.
- Запрещается использовать кресло лицам, не ознакомившимся с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использование изделия в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи открытого огня или нагревательных приборов.

<b>Содержание:</b>	<b>Стр.</b>
1. Общие сведения .....	4
2. Комплект поставки .....	4
3. Технические характеристики.....	4
4. Указание мер безопасности.....	5
5. Регулировка и настройка .....	5
6. Техническое обслуживание.....	5
7. Схема сборки изделия .....	6
8. Для заметок.....	7
9. Гарантийные обязательства.....	8

*Инструкция должна храниться в непосредственной близости от изделия на случай возникновения каких-либо вопросов в процессе эксплуатации.*

## 1. Общие сведения

Кресло косметологическое SD-3560 далее (кушетка) предназначено для проведения массажных и косметологических процедур лица и тела.

## 2. Комплект поставки

1. Металлическое основание – 1 шт.
2. Кушетка мягкая – 1 шт.
3. Подушка под голову – 1 шт.
4. Подлокотники – 2 шт.

## 3. Технические характеристики

Общая длина кушетки .....	183 см
Общая ширина кушетки .....	63 см
Ширина кушетки с подлокотниками .....	85 см
Длина подушки под спину .....	70 см
Длина сидения .....	50 см
Длина подушки под ноги .....	63 см
Высота кушетки .....	64 см
Угол подъема подушки под ноги .....	60°
Угол подъема подушки под голову .....	60°
Вес изделия .....	24 кг

#### **4. Указание мер безопасности**

Кушетка должна находиться на ровной, твердой поверхности. Во время эксплуатации кушетки, не рекомендуется работать острыми, колющими и режущими инструментами, во избежание порезов мягких частей кушетки.

#### **5. Регулировка и настройка**

Косметологическая кушетка не регулируется по высоте. Подушки под спину и ноги регулируются механически. Потяните, не прилагая усилий, на себя рычаг, который находится под подушкой. Остановитесь на нужном уровне и отпустите ручку. Подушка зафиксируется в нужном вам положении. Чтобы поднять спинку, просто приподнимите ее. Чтобы опустить спинку, приподнимите рычаг сзади, придерживая спинку. Подушка под ноги регулируется аналогично.

Подлокотники кушетки имеют встроенные штыри, которые вставляются в отверстия, находящиеся по бокам кушетки. Подлокотники устанавливаются молнией вниз.

#### **6. Техническое обслуживание**

Содержите кушетку в чистоте. Регулярно промывайте ее мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металлические и пластиковые части кушетки обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества. Разрешается обработка всех частей кушетки антисептическими и антибактериальными растворами не содержащими кислоту и другие органические соединения, которые способны растворить покрытие кушетки или смыть с нее краску. Рекомендуется накрывать кушетку тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.

## 7. Схема сборки изделия

