

Кресло косметологическое с двумя  
моторами

**SD-3803A**



Паспорт изделия  
и руководство по эксплуатации

**Уважаемый Покупатель,**

**поздравляем Вас с удачным приобретением!**

Для того чтобы, работа с косметологическим креслом SD-3803A была удобной, приятной и безопасной, просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

**Желаем успешной работы!**

**ВНИМАНИЕ!**

- Продавец не несет ответственности за возможные несчастные случаи или порчу оборудования, произошедшие при его неправильном использовании и несоблюдении руководства по эксплуатации.
- Запрещается включать и использовать кресло лицам, не ознакомившимся с руководством по эксплуатации.
- Перед включением изделия в розетку убедитесь, что требования к напряжению питания соответствуют имеющейся в вашем распоряжении электрической сети.
- Если вы закончили работу с креслом и не планируете включать его снова, рекомендуется выключить основной выключатель и вытащить электрический провод из розетки.
- Запрещается использование изделия в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи открытого огня или нагревательных приборов: это опасно из-за угрозы поражения электрическим током.

<b>Содержание:</b>	<b>Стр.</b>
1. Общие сведения .....	4
2. Комплект поставки .....	4
3. Технические характеристики.....	4
4. Правила техники безопасности.....	6
5. Сборка и подключение.....	6
6. Правила эксплуатации аппарата .....	7
7. Профилактическое обслуживание .....	10
8. Хранение и транспортировка .....	10
9. Гарантийные обязательства.....	10

## 1. Общие сведения

Кресло косметологическое с двумя моторами предназначено для размещения на нем клиента и проведения различных косметологических процедур.

Регулировки положения кресла осуществляются электроприводами при помощи проводного пульта управления: высота подъема кресла (вверх/вниз) и угол наклона спинки. Угол наклона кресла регулируется пневматическим рычагом, расположенным под спинкой. Регулировка ножной подушки кресла осуществляется механически и имеет 18 положений. Подголовник имеет отверстие для лица и регулируется по высоте.




Минимальная высота кресла – 61 см от пола, ножка кресла устанавливается на угол 90 градусов для удобства. При раскладывании в горизонтальное положение подлокотники автоматически опускаются. Отличительными особенностями кресла являются элегантное основание, удобные мягкие подлокотники и подголовник.

## 2. Комплект поставки

1. Кресло – 1 шт.
2. Подголовник – 1 шт.
3. Ножная подушка – 1 шт.
4. Подлокотники – 2 шт.
5. Пульт управления проводной – 1 шт.

## 3. Технические характеристики

Длина .....	190 см
Ширина (по сидению).....	62 см
Высота min .....	61 см
Высота max .....	79 см
Масса нетто.....	65 кг
Масса брутто .....	74 кг
Допускаемая нагрузка .....	200 кг
Питание электродвигателей.....	220V~,50Hz
Внутреннее напряжение .....	24 V-
Максимальная потребляемая мощность.....	90 Вт
Температура помещения при работе .....	от +5 до +30 °С
Температура хранения .....	от -5 до +30 °С

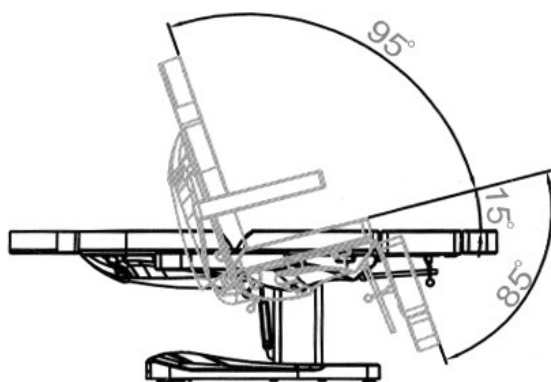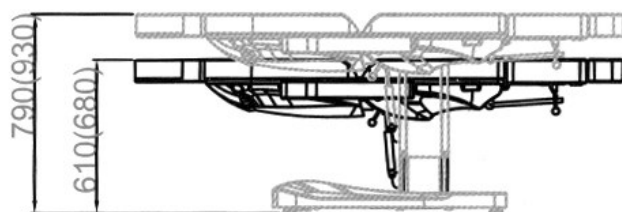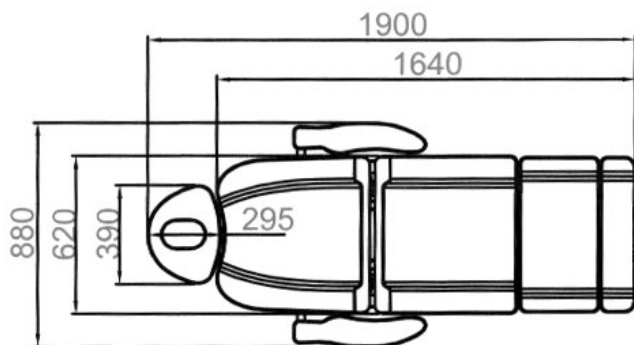

#### 4. Правила техники безопасности

Перед началом работы внимательно прочитайте паспорт и руководство по эксплуатации кресла.

Кресло должно находиться на ровной, твердой поверхности. Во время эксплуатации кресла будьте внимательны при работе с острыми, колющими и режущими инструментами вблизи мягких частей кресла, во избежание порезов.


Не ремонтируйте кресло самостоятельно.

Не оставляйте кресло под прямыми солнечными лучами, при ярком свете или в условиях повышенной влажности, чтобы избежать повреждения.

#### 5. Сборка и подключение

5.1. Освободите устройство от упаковочной пленки, проверьте комплектность поставки и убедитесь в отсутствии повреждений.

5.2. Установите подголовник кресла, подлокотники и ножную подушку вручную. Зафиксируйте с помощью винтов (см. рис).

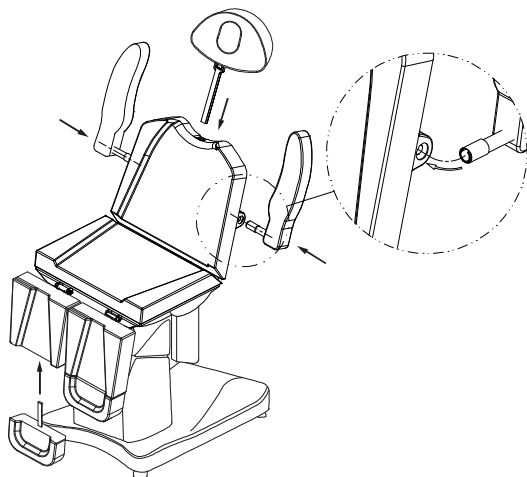

5.3. Подключите кресло к электрической сети.

## 6. Правила эксплуатации аппарата



### 6.1. Внешний вид пульта и назначение кнопок управления.






**Внимание!**


Запрещается одновременно нажимать на две и более кнопки на пульте.

Назначение кнопок управления на пульте:

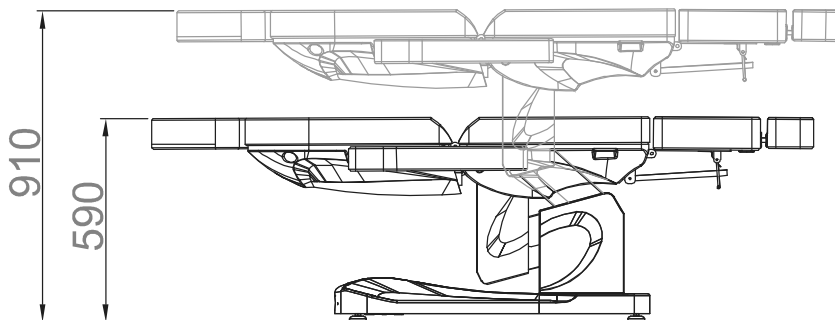6.2. При помощи кнопок  и  регулируется высота кресла.




6.3. При помощи кнопок  и  регулируется угол наклона спинки кресла

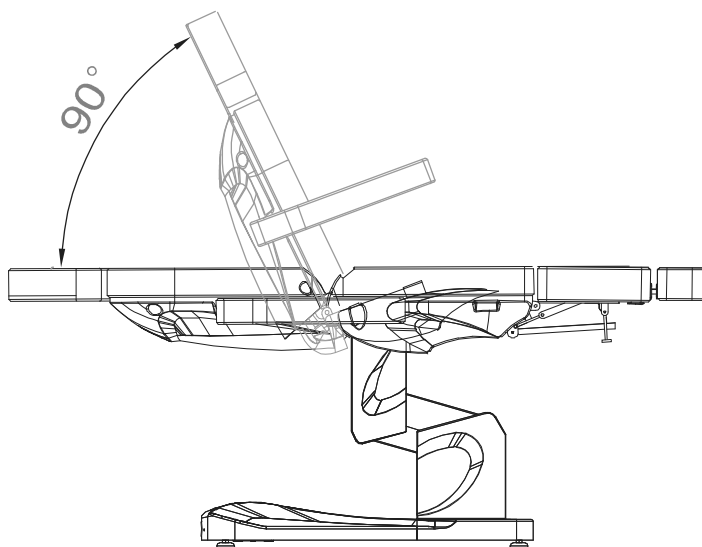



6.4. Для регулировки кресла по углу наклона потяните вверх стопорный рычаг, расположенный за спинкой кресла. При этом кресло за счет пневматического цилиндра начнет наклоняться вперед. Отпустите рычаг, когда кресло примет нужное положение.

Для наклона кресла назад нажмите рычаг и, удерживая его в нажатом положении, с усилием наклоните кресло назад, надавливая рукой на спинку. Обратите внимание: пневматический цилиндр тугой, и, когда в кресле нет человека, усилие должно быть достаточно большим. Когда в кресле сидит клиент, он опирается спиной на спинку кресла, и под его весом кресло наклоняется назад (рычаг должен быть при этом нажат). Отпустите рычаг, когда кресло примет нужное положение.

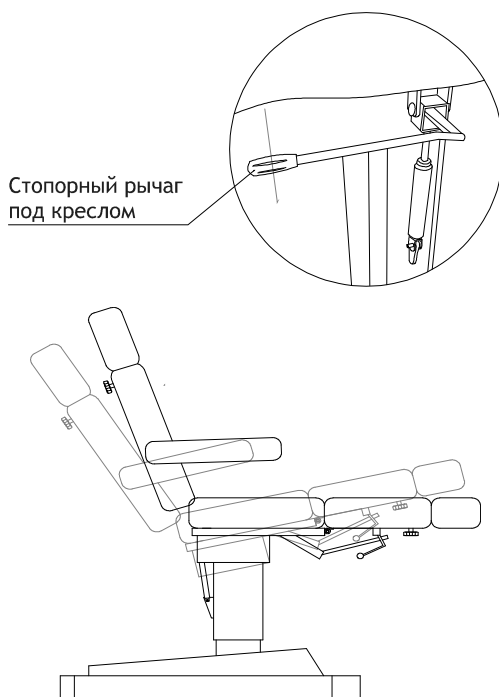

6.5. Регулировка подголовника осуществляется только по высоте. Для регулировки открутите стопорный винт сзади подголовника.