

Косметологическое кресло
с тремя моторами

SD-3870A



*Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации*

**Уважаемый Покупатель,
поздравляем Вас с удачным приобретением!**

**Для того чтобы работа с косметологическим креслом SD-3870A была
удобной, приятной и безопасной, просим внимательно
ознакомиться с руководством по эксплуатации.
Желаем успешной работы!**

Содержание:	стр.
1. Общие сведения	2
2. Комплект поставки	2
3. Технические характеристики	3
4. Сборка и подключение	5
5. Правила эксплуатации кресла	6
5. Профилактическое обслуживание	11
6. Хранение и транспортировка	11
7. Гарантийный талон	12

1. Общие сведения

Косметологическое кресло SD-3870A предназначено для размещения на нем клиента и проведения косметологических процедур.

Отличительными особенностями изделия являются анатомический матрас, устойчивая, надежная конструкция, элегантное основание, удобные подлокотники и подголовник. Высота подъема кресла, угол наклона спинки и сиденья регулируются с пульта при помощи электромоторов.

Для более удобной эксплуатации кресло имеет съемные откидывающиеся секции подлокотников, подстаканники, регулируемый подголовник.


2. Комплект поставки

1. кресло — 1 шт.
2. подголовник — 1 шт.
4. ножная подушка — 1 шт.
5. подлокотники — 2 шт.
7. пульт управления проводной — 1 шт.
5. руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. упаковка — 1 шт.


3. Технические характеристики

Максимальная нагрузка	200 кг
Ширина (по сидению)	580 мм
Размер (ШхГхВ)	1965х810х610-1060 мм
Высота min	610 мм
Высота max	1060 мм
Вес нетто	81 кг
Вес брутто	100 кг
Внутреннее напряжение	-24 В
Питание электродвигателей	-220 В, 50 Гц


3.1. Высота min/max. (мм)

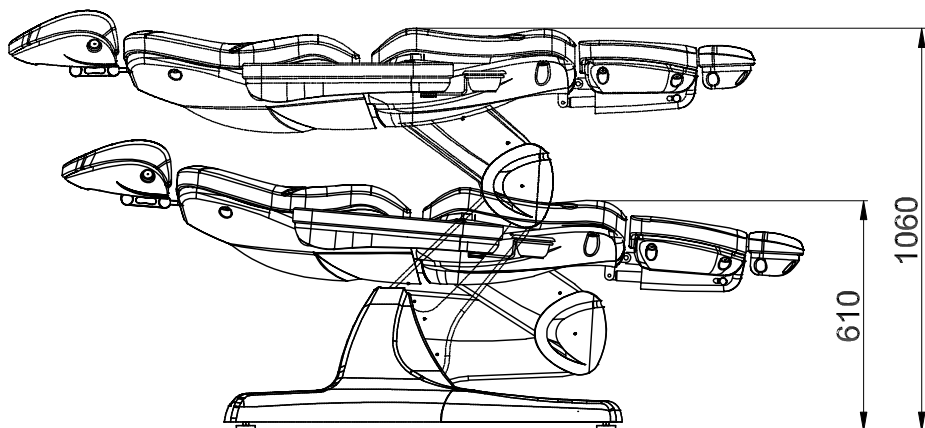

3.2. Ширина/глубина (мм).

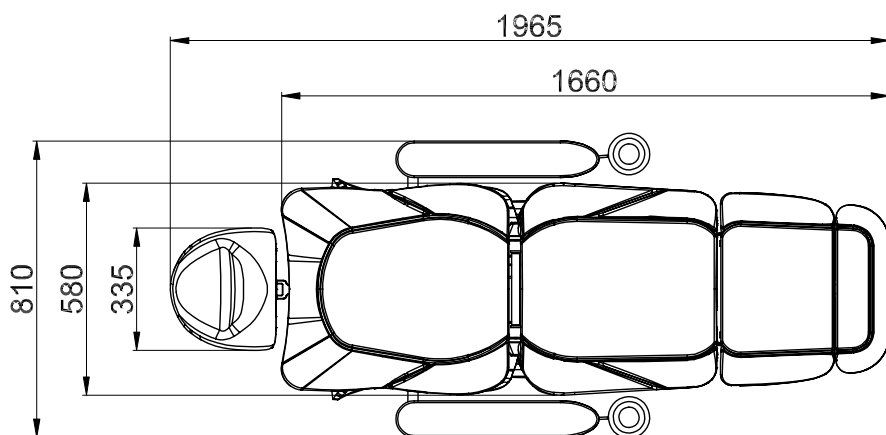


3.3. Угол наклона спинки/сиденья (мм).

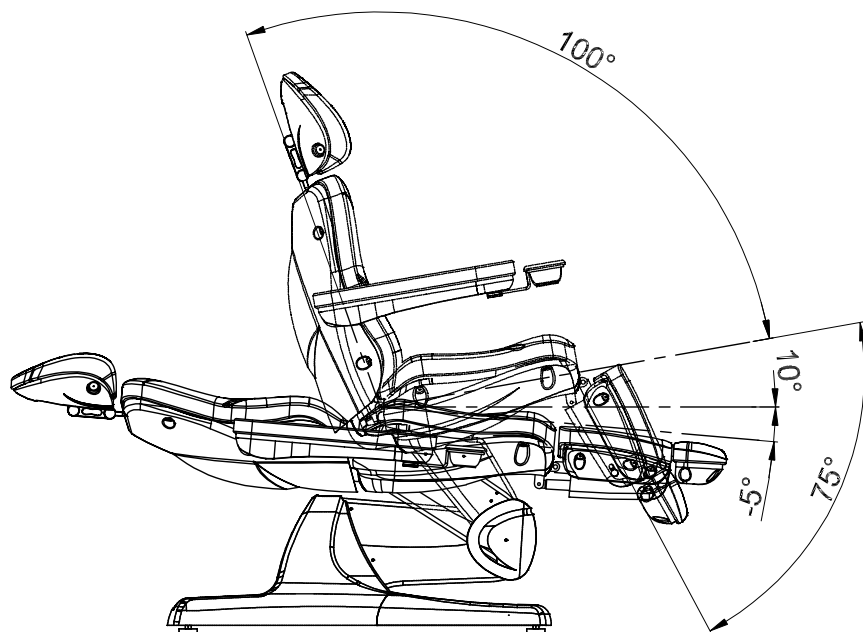

4. Сборка и подключение

4.1. Освободите устройство от упаковочной пленки, проверьте комплектность поставки и убедитесь в отсутствии повреждений.

4.2. Вручную установите подголовник кресла и подлокотники (см. рис).

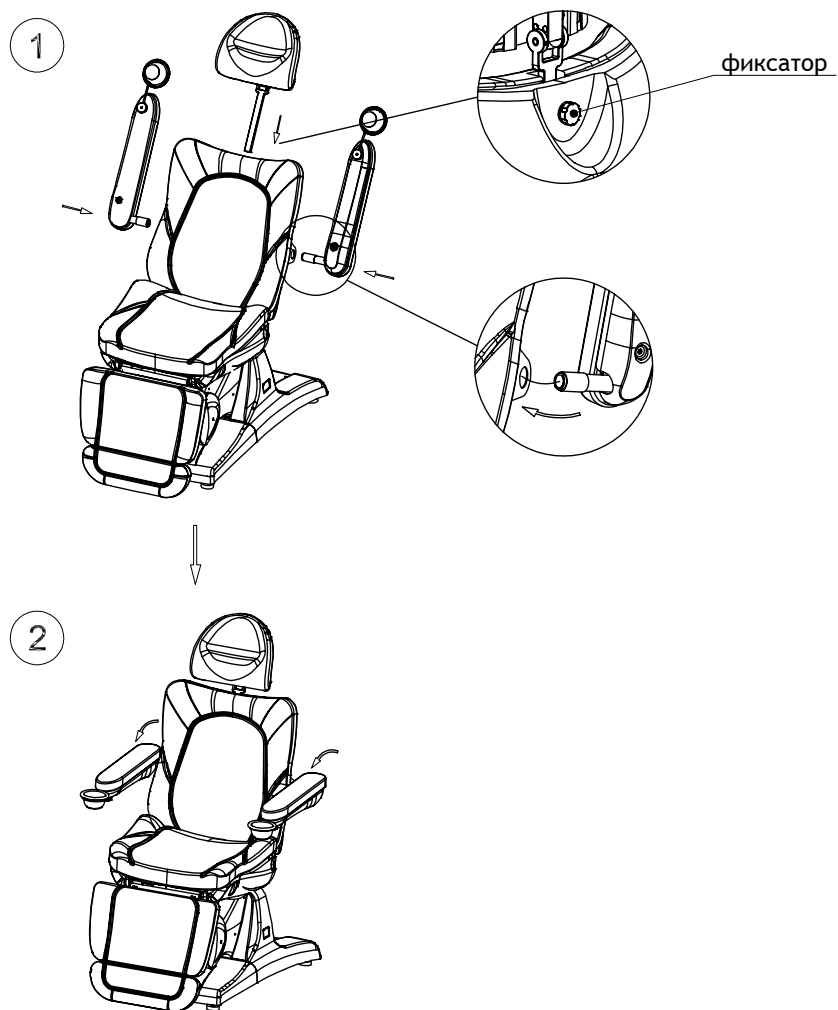

4.3. Подключите кресло к электрической сети.


5. Правила эксплуатации аппарата

5.1. Внешний вид пульта и назначение кнопок управления.




Назначение кнопок управления на пульте:


5.2. При помощи кнопок  и  регулируется высота кресла.

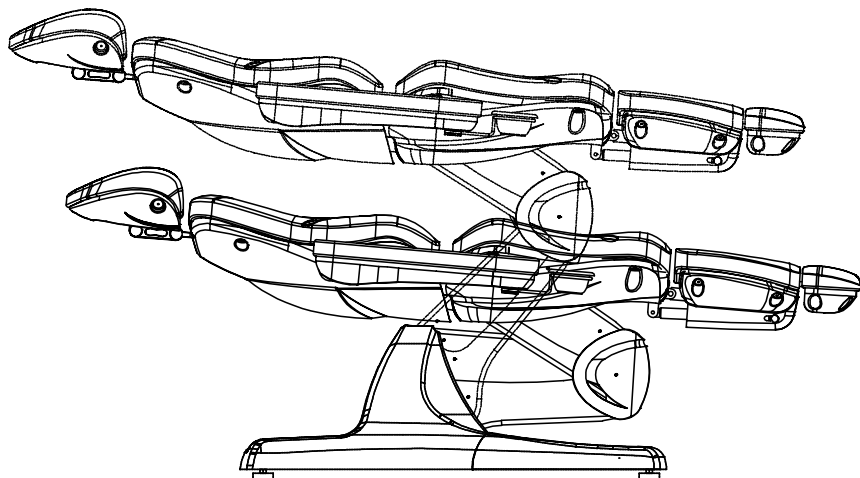

5.3. При помощи кнопок  и  регулируется угол наклона спинки кресла.


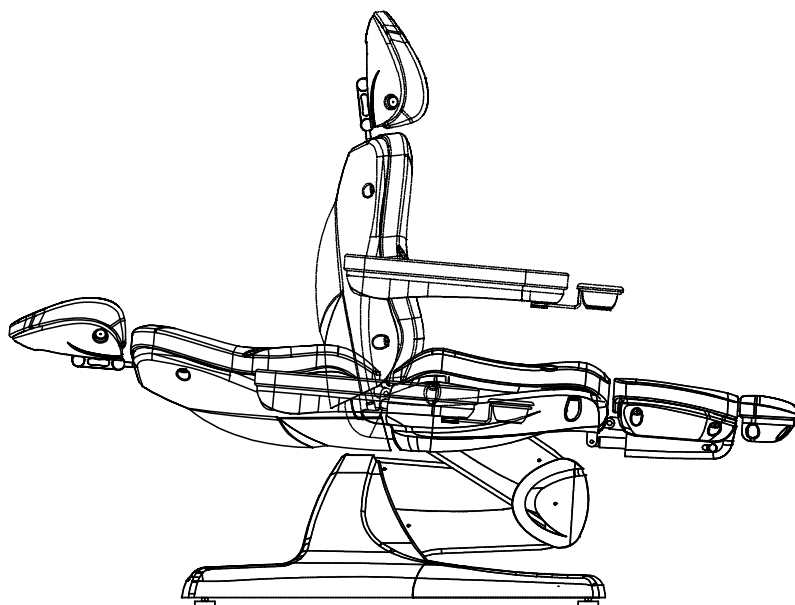


5.4. При помощи кнопок  и  регулируется угол наклона сиденья кресла.

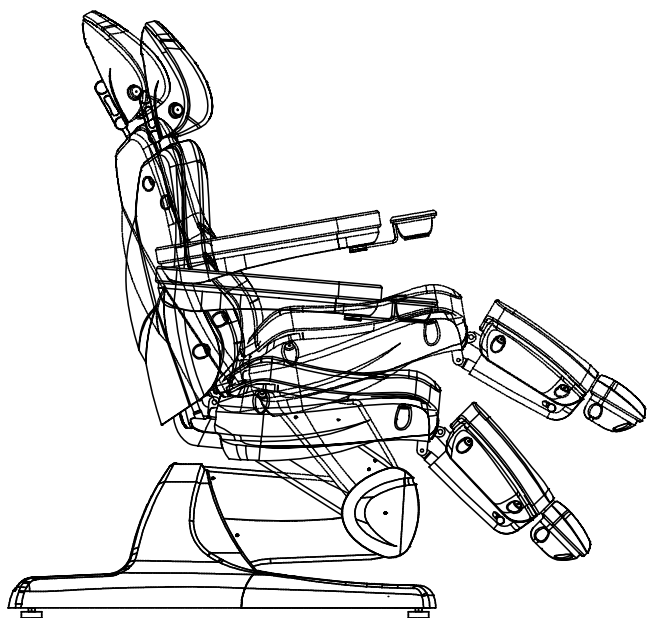

5.5. Регулировка подставки для ног.

регулировка угла наклона подставки
для ног производится с помощью газлифта

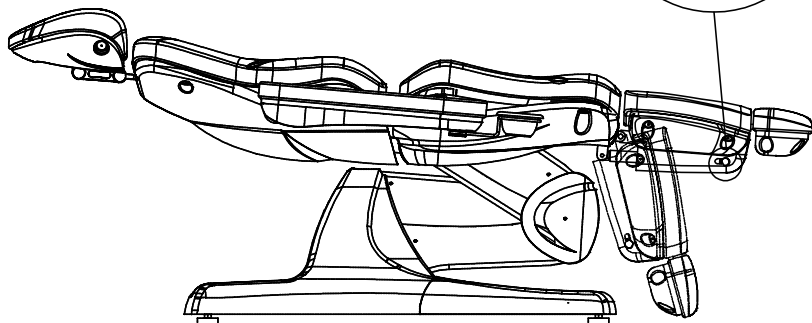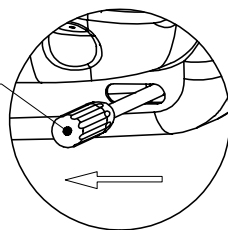

5.6. Регулировка подголовника.

Угол наклона подголовника можно изменять нажатием соответствующей кнопки (рисунок 1):

Нажатием этой кнопки можно изменять угол наклона подголовника как показано на рисунке 2.

Нажатием этой кнопки можно изменять угол наклона подголовника как показано на рисунке 3.

Кнопка подголовника

Рисунок 1.

Подголовник



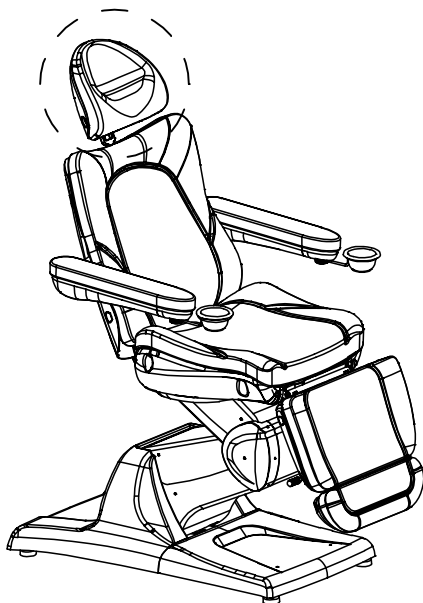


Рисунок 2.

Рисунок 3.

5.7. Регулировка ножной подушки.

Ослабьте фиксатор, раскручивая его против часовой стрелки, установите ножную подушку в нужном положении, затяните фиксатор.

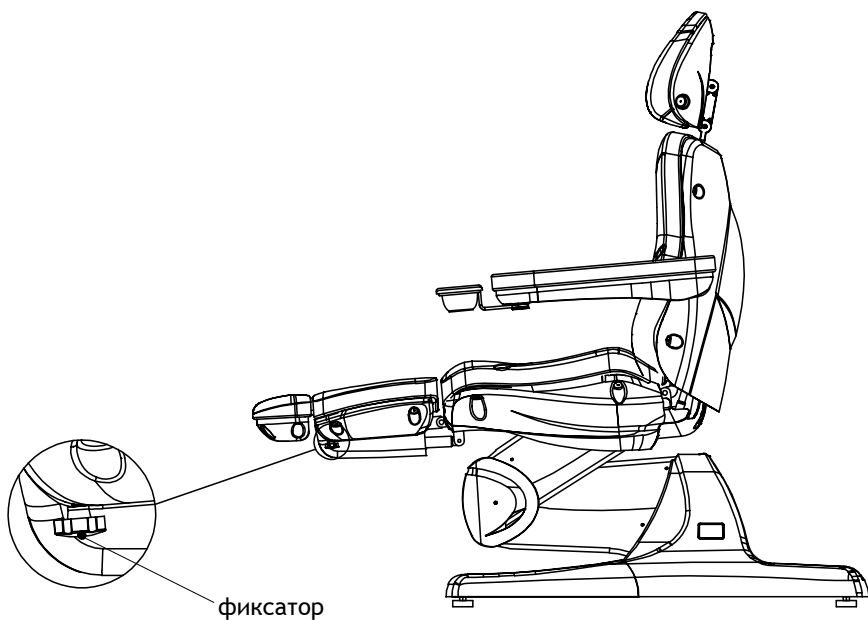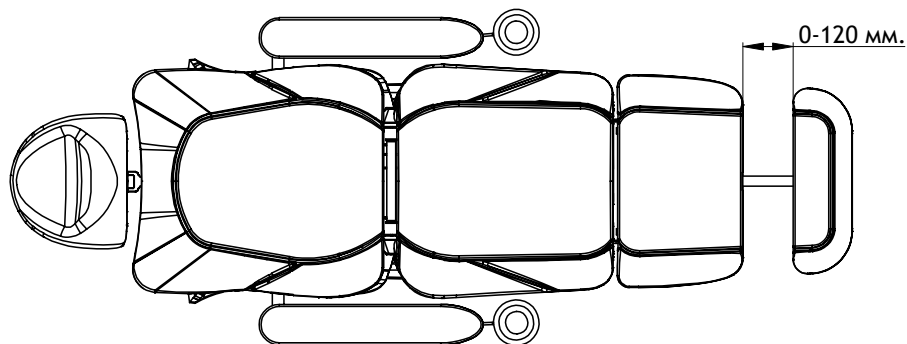

6. Профилактическое обслуживание

Содержите кресло в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металлические и пластиковые части кресла обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества. Разрешается обработка всех частей кресла антисептическими и противобактерицидными растворами, не содержащими кислоту и другие органические соединения, которые способны растворить покрытие или смыть краску. Рекомендуется накрывать кресло тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.

В случае проникновения жидкостей или веществ внутрь оборудования, не пытайтесь удалить их самостоятельно, обратитесь в сервисную службу и не используйте оборудование до момента устранения неисправности.

Чистку и дезинфекцию изделия проводите после каждого использования. Перед чисткой убедитесь, что оборудование отключено от сети (вилка вынута из розетки). Не включайте кресло сразу после чистки.

7. Хранение и транспортировка

Длительное хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях в упакованном виде, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов, при средней температуре не ниже -5°C . Транспортировку изделия следует осуществлять в упакованном виде в соответствии с правилами перевозок.

ВНИМАНИЕ!

- Продавец не несет ответственности за возможные несчастные случаи или порчу оборудования, произошедшие при его неправильном использовании и несоблюдении руководства по эксплуатации.
- Запрещается включать и использовать кресло лицам, не ознакомившимся с руководством по эксплуатации.
- Перед включением изделия в розетку убедитесь, что требования к напряжению питания соответствуют имеющейся в вашем распоряжении электрической сети.
- Если вы закончили работу с креслом и не планируете включать его снова, рекомендуется выключить основной выключатель и вытащить электрический провод из розетки.
- Запрещается использование изделия в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи открытого огня или нагревательных приборов: это опасно из-за угрозы поражения электрическим током.