


АЛКОМЕТР С ДВОЙНЫМ ДИСПЛЕЕМ

можете попробовать несколько раз включить и выключить алкометр.

5. Для завершения установки, еще раз нажмите SET.

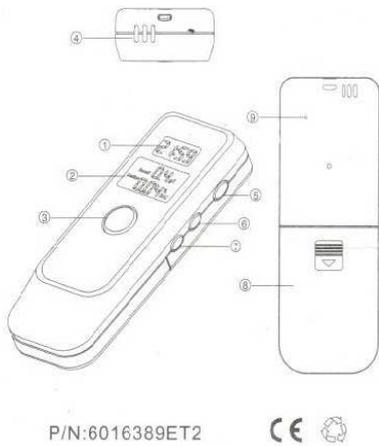

P/N:6016389ET2




- 1) Дисплей с часами
- 2) Дисплей алкотестера
- 3) Кнопка вкл./выкл. Power
- 4) Дыхательное отверстие
- 5) Кнопка MODE
- 6) Кнопка SET
- 7) Кнопка ADJ
- 8) Отделение для батареи
- 9) Кнопка Reset

Особенности

1. Двойной LCD дисплей
2. Электронный алкотестер с аудио сигналом
3. Диапазон измерения: 0,00-0,19% ВАС (0,0-1,9г/л)
4. Быстрая обработка данных
5. Автоматическое выключение
6. Функция часов и будильника
7. Температура
8. Таймер
9. Для алкотестера используются две батарейки типа AAA, для часов используется одна батарейка типа AG13.

Установка батареи


1. Переверните устройство и осторожно потяните вниз крышку отделения для батареек.
2. Установите две батарейки типа AAA (UM-4), соблюдая правильную полярность как указано.
3. Удалите изолятор батарейки 1,5V AG13, чтобы активировать ее.
4. Установите крышку отделения для батареек.

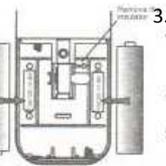

Как использовать алкометр

Подготовка

1. Однократно нажмите кнопку Power, включится дисплей и прозвучит низкочастотный звуковой сигнал.
2. Отобразится символ «waft up» и начнется обратный отсчет от 10 до 0, либо 15-0. Это означает, что идет подготовка алкометра к работе.

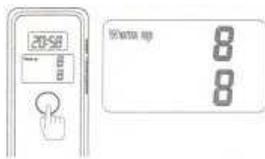

Обратите внимание

- Если первая подготовка будет отменена, алкометр автоматически перезагрузится и снова начнет обратный отсчет.
- На поверхности тестера всегда содержатся в большом количестве газы и различные примеси, когда вы впервые достаете тестер из упаковки или когда вы долго им не пользовались, поэтому может понадобиться больше времени для очистки и разогрева тестера. В этом случае, вы

Тестирование

1. Символ «Blow» загорится на дисплее, когда тестер будет успешно подготовлен. Возобновится обратный отсчет от 10 до 0, что означает – алкометр готов к тесту.
2. Приблизьте алкометр к лицу как указано на картинке и дуйте в дыхательное отверстие в течение 3-5 секунд.
3. Ваш результат теста отобразится на LCD дисплее.
4. Символ предупреждения «Caution» отобразится на дисплее, когда уровень концентрации алкоголя в крови составит от 0,02% ВАС (или 0,2 г/л) до 0,05% ВАС (или 0,5 г/л).



5. Символ опасности «Danger» отобразится совместно с низкочастотным звуковым сигналом, когда уровень концентрации алкоголя в крови составит от 0,05% ВАС (или 0,5 г/л) и выше.

Автоматическое выключение

1. После получения результата теста, дисплей будет работать в течение 15 секунд, затем появится символ «OFF», который будет отображаться в течение 2-3 секунд и алкометр выключится.



2. Если подготовка не будет произведена, алкотестер автоматически выключится.
3. Если вы не воспользовались дыхательным отверстием для тестирования, дисплей будет отображаться «0,00».

Важно!

Для получения более точно результата, производитель рекомендует производить тест 2-3 раза подряд.

Индикация низкого заряда батареи

Если на дисплее мигает индикатор «L», это означает, что заряда батареи не достаточно и алкометр автоматически выключится. Старые батарейки нужно заменить.

Как настроить часы



Время

1. Чтобы установить время, нажмите кнопку ADJ и выберите 12ч или 24ч формат.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы выбрать час. Цифра будет мигать на дисплее времени. Выбрав нужный час, нажмите кнопку ADJ, чтобы его установить.
3. Снова нажмите кнопку SET, чтобы установить минуты. Начнет мигать цифра с минутами. Выбрав нужную, нажмите ADJ, чтобы установить ее.
4. Для завершения установки, еще раз нажмите SET.

Будильник

1. Однократно нажмите кнопку MODE, чтобы включить режим будильника.
2. Нажмите ADJ, чтобы выбрать вкл. или выкл. будильника.
3. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы установить часы будильника. Цифра часа будет мигать на дисплее, чтобы ее выбрать нажмите ADJ.
4. Снова нажмите SET, чтобы установить минуты будильника. Цифры будут мигать на дисплее, выбрав нужную, нажмите ADJ.


Температура

1. Нажмите кнопку MODE дважды, чтобы установить температуру.
2. Нажмите ADJ, чтобы выбрать градусы по C или F.

Таймер с обратным отсчетом

1. Нажмите MODE 3 раза, чтобы установить таймер.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы установить часы таймера. Цифра часа будет мигать на дисплее, чтобы ее выбрать нажмите ADJ.
3. Снова нажмите SET, чтобы установить минуты таймера. Цифры будут мигать на дисплее, выбрав нужную, нажмите ADJ.
4. Для завершения установки, еще раз нажмите SET.
5. Нажмите ADJ, чтобы запустить таймер. Чтобы остановить таймер, снова нажмите ADJ.
6. Когда таймер остановится, прозвучит звуковой сигнал.


Чтобы вернуть заводские настройки, используя тонкий стержень, однократно нажмите на кнопку RESET.

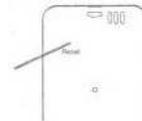

Замена батареек

Замените батарейку AG13, когда цифры на дисплее с часами начнут бледнеть.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

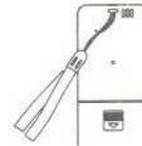

Пожалуйста, установите ремешок для переноски (входит в состав), повязав его через пластиковое ушко сверху в середине алкотестера.

ОСОБЕННОСТИ

- Сенсор: улучшенный оксид-полупроводник
- Диапазон измерения: 0,00-0,19% ВАС (0,0-1,9 г/л)
- Погрешность алкометра: 0,01% ВАС (0,1 г/л)
- Погрешность часов: +/- 2 сек/день
- Входная мощность: 2 x 1,5V батарейки типа AAA (для алкотестера) и 1 x 1,5V AG13 (для часов).
- Рабочее время: в режиме подготовки 10-15сек., распознавание <5сек.
- Автоматическое отключение: через приблизительно 35 сек.
- Размеры: 100x37x17мм

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Применять алкометр рекомендуется спустя 20 минут после употребления спиртных напитков, т.к. требуется примерно 20 минут, чтобы алкоголь впитался в кровь из желудка и остаток алкоголя требуется именно столько минут, чтобы рассеяться во рту.
- Для более точного результата, второй раз применять алкометр рекомендуется спустя 3 минуты после первого применения.
- Перед тестом не ешьте и не курите в течение 20 минут.
- Не используйте для очистки тестера такие химические вещества как бензин, растворитель или керосин.
- Не вдуйте жидкость в дыхательное отверстие.
- Не используйте инсектициды и спиртосодержащие распылительные смеси вблизи алкометра.
- Не оставляйте тестер в закрытых непроветриваемых помещениях с загрязненным воздухом.
- Производитель не несет никакой ответственности за количество промилле, которое показал алкометр.