

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГЛАСПЕРЛЕНОВЫЙ

СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ JN-9008B



Sterilizer JN - 9008B

Jess Nail[®]
PROFESSIONAL

Jess Nail[®]
PROFESSIONAL

Профессиональный Стерилизатор для инструментов JN 9008B
- стерилизует инструменты посредством высоких температур.

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом работы!

Стерилизатор для инструментов JN 9008B - стерилизует инструменты посредством высоких температур.

Технические характеристики:

Наименования товара -

Стерилизатор для инструментов JN 9008B.

1. Температура: 200 С
2. Мощность 75 Вт.
3. Бак стерилизатора выполнен из алюминия.
4. Напряжение: 220 В/50-60 Гц.

Руководство по эксплуатации:

1. Установите устройство на твердую, ровную поверхность.
2. Откройте крышку и заполните бак гласперленом не более чем на 80 %.
3. Подключите устройство к источнику питания, включите переключатель, после того как индикатор станет красного цвета, устройство начнет нагреваться.
4. По истечении 10 - 12 минут индикатор отключается. После этого вертикально положите необходимые для дезинфекции инструменты (такие как: ножницы, бритвы и т.д.) в гласперлен.
5. Спустя 20-30 секунд, наденьте перчатки и выньте уже стерилизованные инструменты. **Внимание:** когда температура достигает 200 С, индикатор автоматически гаснет и устройство перестает нагреваться. Как только температура становится ниже 200 С индикатор загорается, и устройство начинает автоматически нагреваться.

Условия хранения и меры предосторожности:

1. Пожалуйста, очищайте устройство при помощи спирта, при этом никогда не используйте промышленный растворитель, чистящие средства, воду и др. жидкости.
2. Храните устройство в сухом, недоступном для детей месте.
3. Если вы обнаружили нарушение целостности кабеля или любую другую неисправность, обратитесь к производителю, сервисной службе или другим специалистам.
4. Всегда используйте правильное напряжение источника питания
5. Всегда устанавливайте устройство на твердую, ровную поверхность.
6. Используйте устройство только после того как заполните его гласперленом.
7. Заполняйте бак стерилизатора гласперленом не более чем на 80% для того чтобы избежать переполнения бака при помещении в него инструментов для стерилизации.
8. После того как дезинфекция закончилась, необходимо отключить устройство, надеть перчатки, и только после этого вы можете вынуть инструменты.
9. В том случае если устройство не используется – отключите его от источника питания.
10. Очищайте устройство только тогда, когда оно отключено от сети и находится в остывшем состоянии.