



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Чулки компрессионные, арт. 211

Показания к применению:

- Наследственная предрасположенность.
- Избыточный вес.
- Целлюлит.
- Беременность.
- Прием гормональных контрацептивов.
- Функциональные флебопатии.
- Профилактика тромбоза глубоких вен.
- Длительные статические нагрузки.
- Авиаперелеты.
- Длительные поездки на транспорте (автомобиль, автобус, поезд).
- Сидячая работа, работа на ногах.
- Занятия спортом.

Результат применения:

- Увеличение скорости оттока венозной крови от периферии к центру.
- Предотвращение обратного тока крови по венам.
- Уменьшение отеков на ногах.
- Уменьшение ощущения тяжести в ногах.
- Снижение риска тромбоза вен нижних конечностей.

Порядок применения:

- Надевать компрессионный трикотаж утром, сразу после того как встали с кровати.
- После завершения утренних гигиенических процедур необходимо полежать 5–10 минут, приподняв ноги под углом 30–45 градусов для нормализации оттока венозной крови.
- Изделие вывернуть на изнаночную сторону до пятки.
- Надеть изделие на стопу, убедиться, что пятка правильно расположена на ноге.
- Равномерно, не перекручивая, распределите изделие по ноге.
- Надевая, захватывайте пальцами по 3–5 см изделия.
- Не натягивайте изделие, это нарушает его компрессионные свойства.
- Во избежание нарушения целостности изделия используйте резиновые перчатки.
- Если кожа ног влажная, припудрите ноги тальком или детской присыпкой.

Режим и сроки ношения:

- Изделие надевается с утра, сразу после того как встали с постели.
- Изделие снимается перед сном и санируется.
- Изделие носится целый день без перерывов.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Рекомендации по уходу:

Стирать изделие в теплой воде (30 °C). Использовать высококачественные моющие средства. Ручная стирка, не стирать в стиральной машине. Не выкручивать. Не выжимать. Не сушить в барабане. Не отбеливать. Не гладить. Сушить в расправленном виде на ровной поверхности (можно расположить на махровом полотенце), вдалеке от нагревательных приборов. Сухая чистка запрещена.