



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

## Гольфы женские компрессионные арт.311

Гольфы антиварикозные выполнены из комбинированных материалов. Антиварикозный трикотаж 1-го класса компрессии обладает компрессионным воздействием на подлежащие мягкие ткани (18–22 мм ртутного столба). Способствует нормализации оттока венозной крови за счет градуированной компрессии на мышцы и венозную стенку. В области щиколотки и голеностопного сустава компрессия составляет 100%, ниже коленного сустава компрессия уже 70%, а в верхней трети бедра – не более 40% от начального значения. Постепенное снижение компрессии позволяет нормализовать отток жидкости из нижних отделов ног, защищает венозную стенку от деформации и ускоряет ток крови, что упрощает и нормализует работу венозной помпы.

Специальная высокотехнологичная вязка компрессионного трикотажа позволяет оказывать дозированное давление в течение всего дня.

Использование компрессионного трикотажа – общепризнанный метод профилактики и лечения болезней вен нижних конечностей.

### Показания к применению:

- Наследственная предрасположенность.
- Избыточный вес.
- Целлюлит.
- Беременность.
- Прием гормональных контрацептивов.
- Длительные статические нагрузки.
- Авиаперелеты.
- Длительные поездки на транспорте (автомобиль, автобус, поезд).
- Сидячая работа, работа на ногах.
- Занятия спортом.

### Результат применения:

- Увеличение скорости оттока венозной крови от периферии к центру.
- Предотвращение обратного тока крови по венам.
- Уменьшение отеков на ногах.
- Уменьшение ощущения тяжести в ногах.
- Снижение риска тромбоза вен нижних конечностей.

### Порядок применения:

- Надевать компрессионный трикотаж утром, сразу после того как встали с кровати.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

**Оптово-розничный интернет-магазин**

- После завершения утренних гигиенических процедур необходимо полежать 5–10 минут, приподняв ноги под углом 30–45 градусов для нормализации оттока венозной крови.
- Изделие вывернуть на изнаночную сторону до пятки.
- Надеть изделие на стопу, убедиться, что пятка чулка правильно расположена на ноге.
- Равномерно, не перекручивая, распределите изделие по ноге.
- Надевая, захватывайте пальцами по 3–5 см изделия.
- Не натягивайте изделие, это нарушает его компрессионные свойства.
- Во избежание нарушения целостности изделия используйте резиновые перчатки.
- Если кожа ног влажная, припудрите ноги тальком или детской присыпкой.

#### **Режим и сроки ношения:**

- Изделие надевается с утра, сразу после того как встали с постели.
- Изделие снимается перед сном и saniруется.
- Изделие носится целый день без перерывов.

#### **Рекомендации по уходу:**

- Стирать изделие в теплой воде (30 °C).
- Использовать высококачественные моющие средства.
- Ручная стирка, не стирать в стиральной машине.
- Не выкручивать.
- Не выжимать.
- Не сушить в барабане.
- Не отбеливать.
- Не гладить.
- Сушить в расправленном виде на ровной поверхности (можно расположить на махровом полотенце), вдалеке от нагревательных приборов.
- Сухая чистка запрещена.