

Инструкция по эксплуатации ингалятора Omron ComrAir NE-C28

Подготовка небулайзерной камеры к работе

1. Удостоверьтесь, что выключатель питания неактивен.
2. Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
3. Извлеките загубник и заглушку из комплекта ингалятора.
4. Снимите крышку небулайзерной камеры с резервуара для лекарственных средств.
5. Отделите отбойник от резервуара для лекарственных средств.
6. Залейте необходимое количество прописанного врачом лекарственного средства в резервуар для лекарственных средств.
7. Снова вставьте отбойник в резервуар для лекарственных средств.
8. Наденьте крышку небулайзерной камеры обратно на резервуар для лекарственных средств.
9. Прикрепите нужную ингаляционную насадку.
10. Подсоедините воздушную трубку.
11. Прикрепите воздушную трубку к разъёму для воздушной трубки компрессора.
12. Подсоедините другой конец воздушной трубки к разъёму для воздушной трубки резервуара для лекарственных средств.