

energy line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедического изделия

GENUFLEX
ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

DKN-203

WWW.ORLETT.RU

PROPRIOPRESSION® – инновационная зарегистрированная технология вязки из уникальных материалов, обеспечивающая доказанное усиление проприоцепции (мышечного чувства) и ощущения защищенности сустава. Эффект достигается за счет идеально точного прилегания ортезов и медицинской дозированной поддержки суставов. Естественный термо- и влагообмен, микромассажный эффект в зоне нагрузок ускоряют восстановление и обеспечивают исключительный комфорт при любой активности. Усиление проприоцепции в ортезах **ORLETT Energy Line**, изготовленных по технологии **PROPRIOPRESSION®**, протестировано и подтверждено ведущими медицинскими научно-исследовательскими центрами.

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ПЛОСКАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ВЯЗКА


Обеспечивает максимальное анатомическое прилегание

Стабилизирует и разгружает сустав

Распределяет компрессию по всей длине ортеза, снижая её к краям

Обладает противоотёчным действием

Сохраняет нормальное кровообращение, не создает эффект «жгута»

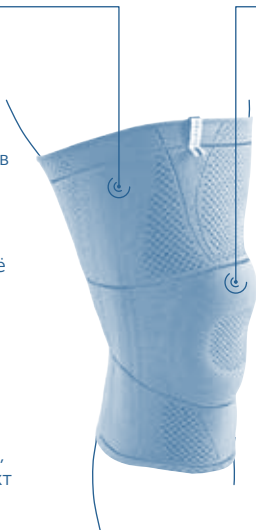

ВЯЗКОЭЛАСТИЧНАЯ ВСТАВКА

Снимает давление с коленной чашечки

Оказывает дополнительное массажное действие

Препятствует нарастанию и перераспределению отека

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- вторичная реабилитация после травм и операций на коленном суставе;
- гониты;
- воспалительно-дегенеративные заболевания коленного сустава, в т.ч. сопровождающиеся болевым и отечным синдромами;
- пателлофemorальный болевой синдром;
- тендомиопатии;
- профилактика травм коленного сустава, в т.ч. в спорте.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожных покровов в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения изделия.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Ортез натянуть на область коленного сустава так, чтобы вязкоэластичная вставка расположилась вокруг коленной чашечки.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

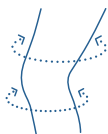

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность бедра на 15 см выше середины коленного сустава и окружность голени на 5 см ниже середины коленного сустава.

Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

| Размер | Окружность бедра на 15 см выше середины коленного сустава, см | Окружность голени на 5 см ниже середины коленного сустава, см |
|--------|---|---|
| XS | 41-43 | 28-31 |
| S | 43-46 | 31-34 |
| M | 46-49 | 34-37 |
| L | 49-52 | 37-40 |
| XL | 52-56 | 40-43 |
| XXL | 56-58 | 43-46 |

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется при- мерить изделие. Важно, чтобы ортез был удобен.



ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ

37,3% полиамид, 9,3% эластан, 5,5% полиэстер, 4% термопластичный полиуретан, 13,4% сталь, 30,5% силикон.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. DKN-203, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01697 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

