



Насадки на унитаз
10528, 10528А, 10528А/Т,
10527L, 10545, 10540



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	6
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	6
2.1 Важные предупреждения.....	6
2.2 Руководство по сборке.....	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	8
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	10

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик насадок на унитаз 10528; 10528А; 10528А/Т; 10527L; 10545; 10540.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Насадки на унитаз, увеличивая высоту санитарного устройства, облегчают пользование туалетом людям после перенесенных травм, операций, а также инвалидам разных категорий. Насадки увеличивают высоту унитаза, что способствует оптимальному положению пациента и обеспечивают ему комфорт. Насадки выполнены из белого прочного и легко моющегося полиэтилена. Они подходят на унитазы любой формы и не требуют специального инструмента.

1.2 Технические характеристики

Модель 10528.

- Насадка на унитаз с гигиеническим вырезом
- Материал: гигиенический, ударопрочный пластик
- Регулируемый фиксатор по внутренней плоскости унитаза
- Вес: 2 кг
- Макс. нагрузка: 115 кг
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10528А.

- Насадка на унитаз с гигиеническим вырезом
- Разборная конструкция рамы
- Быстросъемные алюминиевые поручни с мягкими валиками
- Материал: гигиенический, ударопрочный пластик
- Регулируемый фиксатор по внутренней плоскости унитаза
- Вес: 2,7 кг
- Макс. нагрузка: 115 кг
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10528А/Т.

- Насадка на унитаз с гигиеническим вырезом
- Разборная конструкция рамы
- Съёмные алюминиевые поручни с мягкими валиками
- Увеличенное расстояние между поручнями
- Материал: гигиенический, ударопрочный пластик
- 3 регулирующих фиксатора по внешней плоскости унитаза
- Вес: 1,4 кг
- Макс. нагрузка: 115 кг
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10527L.

- Насадка на унитаз с гигиеническим вырезом и крышкой
- Материал: гигиенический, ударопрочный пластик
- 3 регулирующих фиксатора по внешней плоскости унитаза
- Вес: 1,4 кг
- Макс. нагрузка: 115 кг
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10545.

- Насадка на унитаз
- Регулируемая высота сиденья
- Защита от брызг
- Материал: гигиенический, ударопрочный пластик
- 5 регулирующих по высоте фиксатора на обод стандартного унитаза
- Вес: 1,6 кг
- Макс. нагрузка: 115 кг
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10540.

- Насадка на унитаз
- Возможность регулировки расстояния между поручнями
- Регулируемая высота поручней
- Поручни изготовлены из анодированного алюминия
- Поручни оснащены резиновыми противоскользящими наконечниками
- Пластина-фиксатор на стандартный унитаз
- Вес: 4 кг
- Макс. нагрузка: 100 кг
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

1.3 Упаковка

В комплектации: Насадка на унитаз, поручни (кроме моделей 10545, 10527L, 10528), винты (только с моделью 10528A/T), крепежные элементы (только с моделью 10540).

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.


2.2 Руководство по сборке.

Модель 10540.

Внимание: измерьте параметры Вашего унитаза и отрегулируйте ножки по ширине так, чтобы они подходили к Вашему унитазу.

Для установки поручней снимите с унитаза сиденье с крышкой.

1) Деталь №1 зафиксируйте к корпусу унитаза крепежными элементами сиденья.

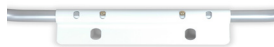

Деталь №1

2) Посредством кнопочного замка на ножках совместите поручни с отверстиями детали №1 до щелчка, два положения замка позволяют регулировать ширину поручней.

3) Посредством кнопочного замка на телескопических ножках отрегулируйте высоту поручней.

Модель 10528А/Т.

Прикрепите поручни к нижней части насадки на туалет с помощью винтов.

Модель 10528А.

Посредством кнопочного замка совместите поручни с отверстиями насадки на туалет до щелчка.

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте изделие на наличие трещин и поломов.