



Умный термометр iTHERM

www.itherm.ru

Характеристики

Вес	20 грамм (Без батарейки)
Диапазон	32°C - 43°C
Точность	+/- 0,1°C
Единицы измерения	°C или F
Батарея	CR2032 3V (210mAh)
Время работы	1000 часов
Обхват руки	100 мм - 180 мм
Зона действия	=10 метров (Без стенов)
Режим соединения	BLE 4.0
Приложения	iFever, iFO Smart, iSee Care

Сертификация продукта



Сертификация GOCT P



Сертификация CE



Сертификация RoHS



Сертификация FCC

Меры предосторожности

1. Не роняйте и не сгибайте термометр;
2. Избегайте контакта нижней стороны электронной части прибора с жидкостями;
3. Экран прибора можно очищать с помощью спирта, а рабочую часть прибора – протирать сухой тканью. Не погружайте аппарат в воду и не пытайтесь продезинфицировать его в кипящей воде – термометр не водостойкий;
4. Не разбирайте устройство, за исключением необходимости сменить батарейку;
5. Термометр может повредиться, если Вы подвергаете его воздействию высоких температур или используете под прямым солнечным светом. Избегайте контакта прибора с химическими растворителями, чтобы исключить неполадки, вызванные химическими реакциями;
6. Батареи следует перерабатывать или утилизировать отдельно от бытового мусора. Такой подход позволяет защитить окружающую среду и здоровье людей.

Выражение благодарности


В первую очередь, позвольте поблагодарить Вас за выбор умного термометра для детей iTHERM. Эта инструкция содержит информацию о том, как безопасно пользоваться прибором. Перед тем как впервые использовать данное устройство, обязательно прочтите данный текст. Умный термометр для детей iTHERM – компактный, портативный и простой в использовании прибор. Термометр был разработан для круглосуточного измерения температуры в реальном времени. Температура отображается как на экране термометра, так и на экране Вашего мобильного устройства (смартфон, планшет). iTHERM оснащен функцией оповещения при высокой температуре, ведения истории измерений и системой удаленной синхронизации с iCloud.

Функции приложения

- Термометрическая (измерение температуры)
- Сигнальное оповещение с высокой температурой
- Ведение заметок
- График температурных изменений
- Сохранение данных в облако



- Материал ремешка безопасен для детской кожи

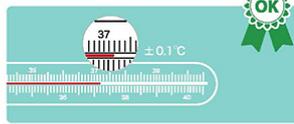


- Термометр прошел проверку на точность

Условия гарантийного ремонта

1. При выявлении дефектов в материалах или неполадок в работе устройства, неисправные части должны быть отправлены в предоплаченной Вами посылке. Когда посылка придет к нам, мы возместим Ваши расходы, включая затраты на доставку.
2. В посылку следует вложить копию чека и гарантийный талон с указанной в нем причиной возврата и количеством взысканных товаров.
3. Гарантия VIPOSE не распространяется на неисправности:
 - (1) Случившиеся после окончания гарантийного периода
 - (2) Связанные с неправильным использованием прибора
 - (3) Повреждения, нанесенные в связи с человеческой деятельностью: прибор сорван или был утерян
 - (4) Потертости, коррозии, выцветание в связи с регулярным использованием

Руководство по эксплуатации

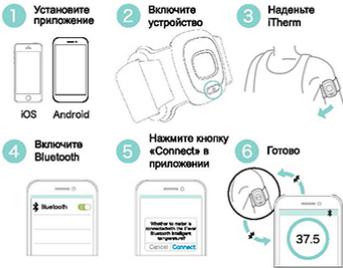

Функциональные клавиши/иконки



- * Пожалуйста, подключитесь к приложению в течение пяти минут после включения экрана

Copyright



Copyright © 2014 VIPOSE, Inc. All Rights Reserved.
VIPOSE – это зарегистрированная торговая марка компании VIPOSE. Все права защищены. Все названия продуктов и компаний, упомянутые в этом руководстве – торговые марки, принадлежащие их законным владельцам

Правовая оговорка

Приложение iFever (далее по тексту «iFever») – это программное обеспечение для мобильных устройств, разработанное VIPOSE INC. (далее по тексту VIPOSE INC.). Пользователи используют это обеспечение на добровольной основе и берут на себя все риски, связанные с использованием данного продукта. VIPOSE INC не отвечает за статьи и информацию, собранную на основании использования этого приложения. Сертификация электронных документов соответствует сертификации печатной версии. Оба сертификата обладают законной силой. Устанавливая iFever вы признаете, что вы прочли условия сертификации и согласились с ними. В связи с вышеуказанными условиями, вы не только получаете права пользования, но также попадаете под определенные ограничения и запреты. Любое нарушение данного соглашения приводит к прекращению полномочий и представляет нарушение авторских прав. VIPOSE обладает правом проводить приложения с целью остановить ненадлежащий урон. VIPOSE оставляет за собой все права на распространение и привлечение к ответственности.

Как правильно надеть



Если вы надеваете прибор на запястье, проведите руку, чтобы ремешок не висел

Если надеть термометр неправильно, можно получить неточные результаты

Замена батарейки



Внимание!

Bluetooth-термометр iTHERM не является медицинским изделием и предназначен для дополнительного измерения температуры тела.

Термометр iTHERM создан специально для Вашего комфорта при контроле температуры больного во время сна.

При первых признаках заболевания рекомендуем незамедлительно обратиться к врачу.

Мы искренне надеемся, что каждый ребенок вырастет здоровым, и мы используем любую возможность, чтобы угодить нашим клиентам. Пожалуйста, не стесняйтесь связываться с нами, если возникнут вопросы.

На термометр iTHERM распространяется гарантия длительностью один год с момента покупки.

Пожалуйста, обращайтесь в клиентский отдел с предложениями по улучшению.

Гарантийный талон

Дата : _____

Адрес : _____

Имя : _____

Продавец : _____

Подпись : _____



Address: A05, 1/F, Skyworth Semiconductor Design Building East, Gaoxin South Fourth Street No. 18, Nanshan District, ShenZhen