




Инструкция по применению.

- Лечебный медицинский трикотаж надевайте утром, как только проснулись. В это время Ваши ноги еще не отечны и поверхностные вены незначительно заполнены кровью.
- Если Вы снимаете компрессионный трикотаж в течение дня, то надевать его нужно после 10-15 минутного отдыха ног в приподнятом положении.
- Для облегчения надевания изделия ноги нужно припудрить тальком или детской присыпкой.
- Помните, что острые ногти, мозоли, заусенцы на руках и ногах могут повредить изделие. Поэтому при использовании компрессионного трикотажа нужно постоянно ухаживать за ногтями и кожей рук и ног.
- Перед надеванием лечебного трикотажа убедитесь, что ноги и руки должны быть сухими.
- Компрессионный трикотаж накладывают, а не натягивают.
- Не перекручивайте трикотаж и не тяните изделие вверх за удерживающую резинку.
- Не допускайте повреждения трикотажа неудобной обувью, а также следите за тем, чтобы внутренняя поверхность обуви была в хорошем состоянии, так как ее дефекты могут привести к повреждению изделия


Обратите внимание!

- Кольца, браслеты и другие украшения на руках могут повредить изделие. Их нужно снимать перед надеванием и стиркой компрессионных изделий.
- Рекомендуется надевать изделие в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.
- При надевании и снятии чулок не тяните за ажурную резинку во избежание отрыва резинки от чулка.
- Не обрезайте концы ниток или этикетки, чтобы не распустились узлы, полученные в процессе изготовления трикотажа


Схема надевания.

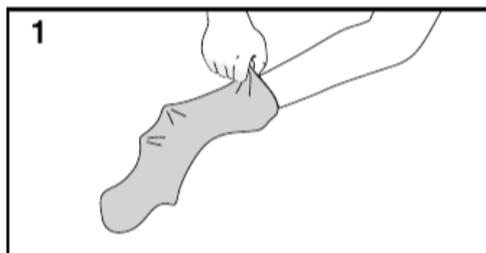


Выверните изделие наизнанку до пятки.

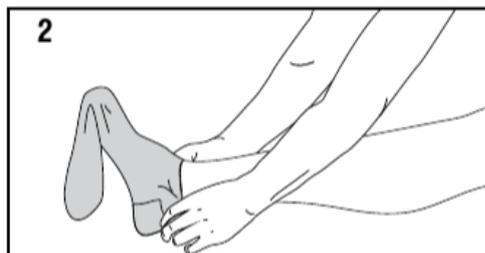

Осторожно натяните изделие на ступню и убедитесь, что пятка изделия правильно расположена на ног

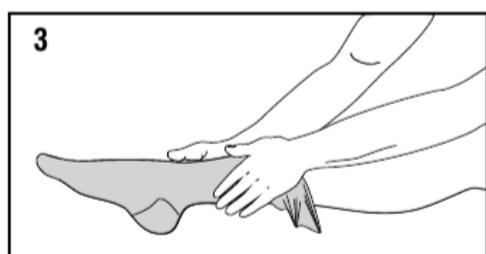

Натягивайте изделие разглаживающими движениями через лодыжку к колену, растягивая каждый участок. Не следует тянуть изделие с усилием за верхний край.

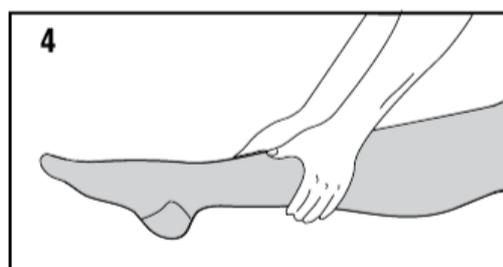

Окончательно разгладьте мелкие морщинки по всей длине изделия.

Уход.

- Рекомендуется ежедневная стирка в стиральной машине (деликатная стирка) или в ручную при температуре не более 30°C.
- В качестве моющих средств следует выбирать жидкие слабощелочные шампуни или средства для стирки деликатных тканей. Не используйте стиральные порошки и кондиционеры.
- При машинной стирке используйте защитный мешочек для белья. Не используйте режим машинной сушки.
- После ручной стирки изделие нужно тщательно прополоскать в тёплой воде.
- Не выкручивайте изделие, заверните его в полотенце и слегка отожмите.
- Сушите изделие при комнатной температуре.



Обратите внимание!

- Изделие нельзя кипятить, отбеливать, выжимать, прилагая особую силу, гладить и сушить на батареях, нагревательных приборах, сушилках и под прямыми лучами солнца.
- Недопустимо использование химических растворителей и пятновыводителей, которые повреждают изделие.
- Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.
- Для предотвращения образования складок полностью просушите изделие, и аккуратно сложите его в оригинальную упаковку; или храните в подходящем защитном мешочке.
- При использовании мазей и кремов возможно уменьшение фиксации силиконовой на чулках. Для лучшей фиксации с кожей силиконовые полоски рекомендуется протирать хлопковой тканью, смоченной 20%-м спиртовым раствором.



Обратите внимание: имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.