


Инструкция по применению компрессионного трикотажа Luomma Idealista.




Инструкция по надеванию медицинского компрессионного трикотажа:

Руками

• Закрытый носок

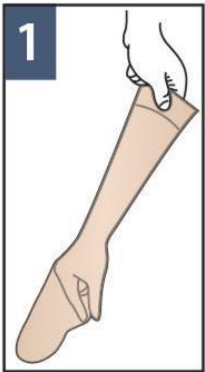


1) Просунув руку внутрь изделия, захватите пятку.

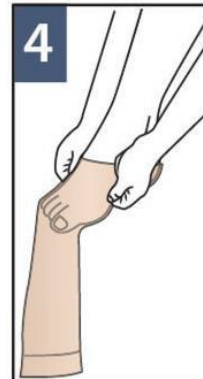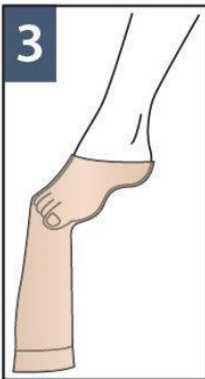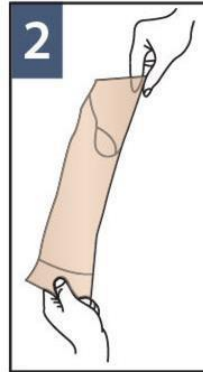


4) С двух сторон подтяните вывернутую часть изделия на пятку.



5) Перехватите вывернутую часть изделия и наложите ее выше, на лодыжку

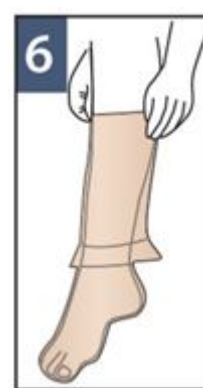


6) Перехватывая вывернутую часть трикотажа, поэтапно

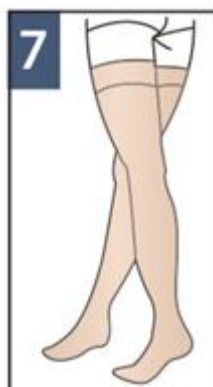

7) Равномерно распределите трикотаж по всей длине. Расправьте складки и потяните изделие за носок, чтобы освободить большие пальцы

• Открытый носок

Для надевания лечебного компрессионного трикотажа с открытым носком необходимо использовать прилагаемый к изделию шелковый носок.

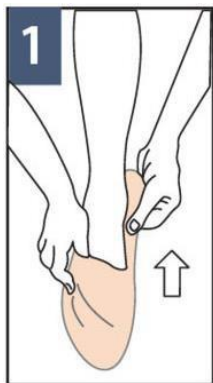

1) наденьте на стопу шёлковый носок.




2) просунув руку внутрь изделия, захватите пятку.

Выверните чулок или гольф наизнанку. Наденьте изделие



3) снимите вспомогательный шёлковый носок через отверстие в области пальцев.

GD Á Á K
 Á
 FĚÁ Á Á Á Á Á ĚÁ Á Á Á Á ÁÁ È
 GĚÁ Á ÁÁ Á Á ĚÁ Á Á Á Á Á ĚÁ
 HĚÁ Á Á Á Á Á ĚÁ
 I ĚÁ Á ÁÁ Á ĚÁ Á Á Á Á ĚÁ
 Í ĚÁ Á Á Á Á Á Á ĚÁ
 Î ĚÁ Á ĚÁ
 Ī ĚÁ Á Á Á ĚÁ
 Ì ĚÁ Á Á Á Á Á ĚÁ Á Á Á ĚÁ

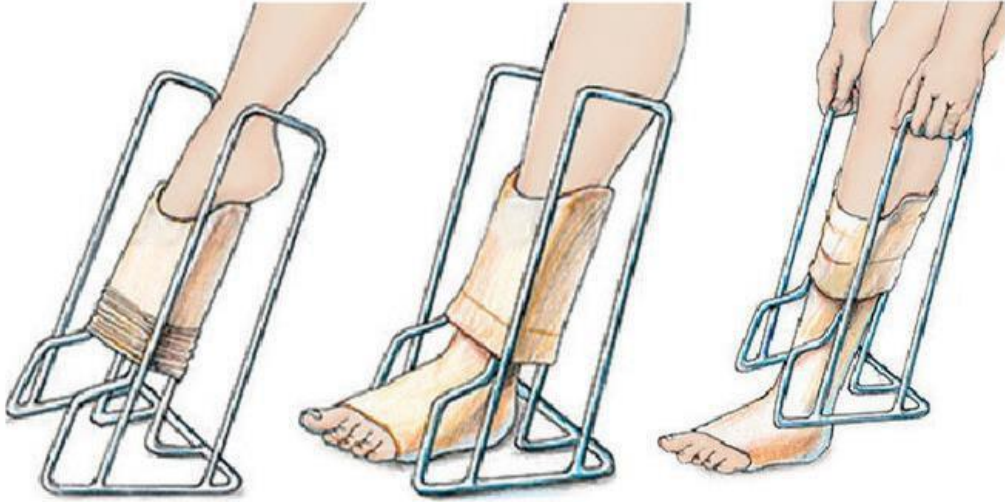

Инструкция :

FĚÁ Á Á Á Á ĚÁ ĚÁ Á Á Á ĚÁ Á Á Á
 Á Á ĚÁ
 GĚÁ Á Á Á ĚÁ Á Á Á

. Á

ÁÁÁ Á Á Á Á
 ÁÁ Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á È
 ÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ĚÁ Á LÁ
 Á Á Á Á Á LÁÁ
 ÁÁÁ Á Á
 ÁÁ Á Á Á Á LÁÁ
 ÁÁÁ Á ÁÁ Á K
 ÁÁ Á Á Á Á Á Á ĚÁ Á Á Á È