

**Удовольствие  
в заботе!**



**Массажер  
КТ-2932**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Из-за нехватки свободного времени визит к массажисту часто откладывается на неопределенный срок. Но теперь оказать расслабляющие действие на мышцы можно и дома с помощью массажера КТ-2932. Сеанс массажа, проведенный в домашней атмосфере, даст возможность получить порцию приятных эмоций. Массаж помогает снять усталость и напряженность, поднять настроение.

Большинство людей после интенсивного рабочего дня испытывают мышечный гипертонус. Сеанс массажа поможет добиться быстрого успокоения сознания и тела, избавиться от мышечных спазмов. Делать массаж рекомендуется перед сном, особенно тем, кто страдает от частых пробуждений и длительного засыпания.

Массажер прост в управлении: расправьте его на кровати, диване или кресле с высокой спинкой и управляйте с помощью пульта, который можно убрать в карман для хранения. Вы можете зафиксировать массажер резинкой, расположенной в верхней части массажера.

Для полноценного расслабления мышц тела массажер оснащен десятью вибромеханизмами: по два на зоны шеи, спины и поясницы и четыре на зону ног.

Чтобы снять мышечное и нервное напряжения используйте один из пять режимов: импульсный, постукивающий, прокатывающийся, разминающий и расслабляющий. Импульсный, постукивающий, прокатывающийся режимы направлены на усиление стимуляции циркуляции крови и лимфотока. А разминающий и расслабляющий режимы оказывают общее успокаивающее действие на организм, что способствует устранению проблем со сном.

После выбора режима выберите один из трех уровней интенсивности вибрации, чтобы насладиться идеальным массажем. Чтобы сделать массаж еще приятнее, в данной модели предусмотрен прогрев зоны лопаток.

Также можете отрегулировать массажер под ваши индивидуальные потребности в данный момент. Для этого выберите одну или несколько зон массажа: шея, спина, поясница, ноги. Установите нужную интенсивность вибрации и при желании включите подогрев. Так вы сможете создать идеальный массаж именно для вас.

После 15-минутного сеанса массажа сработает автоотключение.


Массажер складывается для удобного хранения и поставляется с ремнем для фиксации в сложенном виде.

Если у вас есть кардиостимулятор, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера.


## Комплектация

1. Массажер с пультом управления и коннектором для подключения блока питания — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*  
\*опционально

## Устройство массажера

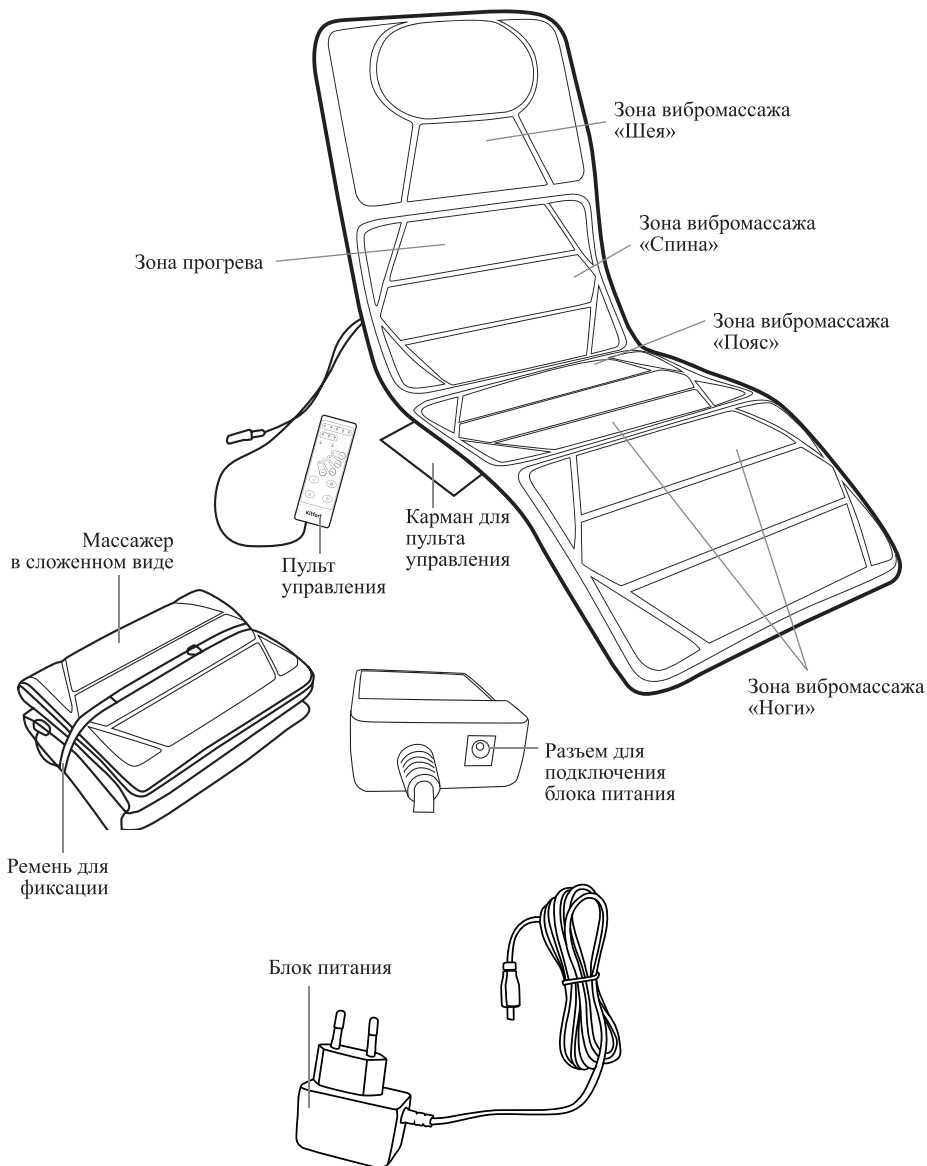

## Панель управления

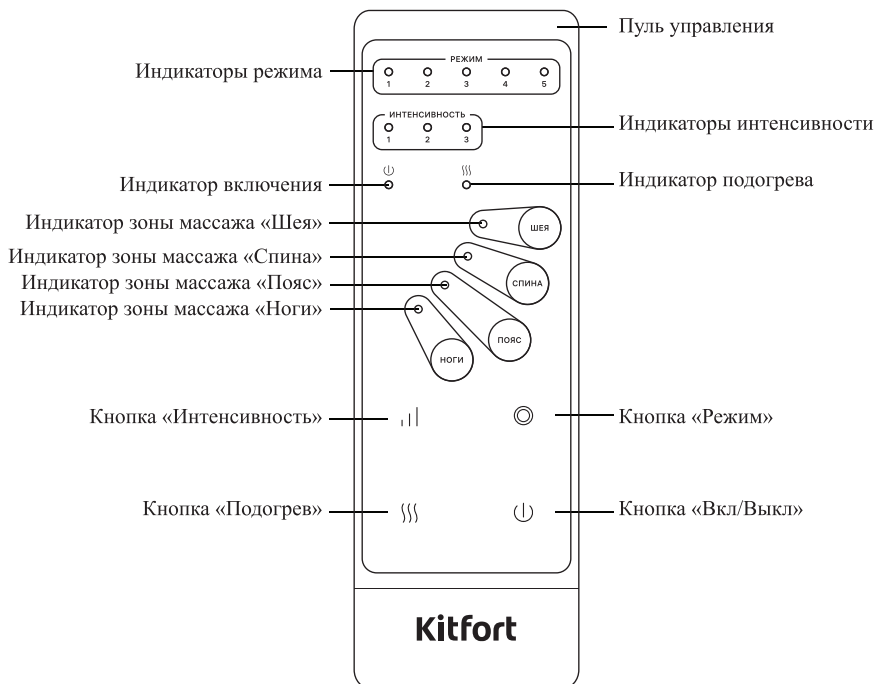

Управление массажером осуществляется пультом.

**Кнопка «Вкл/Выкл»** — включение и выключение массажера. Нажмите на кнопку, индикатор включения загорится — массажер готов к работе.

**Кнопка «Режим»** — выбор режима работы массажера. Однократное нажатие на кнопку переключит массажер на следующий режим. Переключение происходит циклически, т.е. после выбора 5 режима нажмите на кнопку еще раз, чтобы переключить на 1 режим. Над номером выбранного режима будет гореть индикатор, а индикаторы зоны массажа будут загораться, обозначая зону массажа в реальном времени.

**Кнопка «Интенсивность»** — выбор уровня интенсивности вибрации во время массажа. Однократное нажатие на кнопку переключит массажер на следующий уровень интенсивности. Переключение происходит циклически, т.е. после выбора 3 уровня нажмите на кнопку еще раз, чтобы переключить на 1 уровень. Режим 1 — самый слабый, 3 — самый сильный. Над номером выбранного уровня интенсивности будет гореть индикатор.

**Кнопка «Подогрев»** — включение и выключение подогрева. Нажмите один раз для включения подогрева, индикатор подогрева загорится. Нажмите повторно, чтобы отключить подогрев, индикатор погаснет. Температура подогрева: 48 °С.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте массажер из коробки и удалите весь упаковочный материал.

Поместите массажер на кровать, диван или кресло с высокой спинкой. При необходимости зафиксируйте массажер резинкой, расположенной в верхней части массажера.

Подсоедините блок питания к разъему на пульте управления, а сам блок питания подключите к сети.

### Использование

1. Расположитесь на массажере, расслабьтесь. Проводите сеанс массажа в одежде без каких-либо декоративных элементов (ремней, пуговиц, молний и т. п.). Наличие аксессуаров на одежде может нанести вам ушибы во время массажа.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор включения загорится красным. По умолчанию начнется последовательное циклическое переключение режимов от 1 до 5 с периодичностью 1 минута и интенсивностью вибрации 2.
3. Нажимайте на кнопку «Режим», чтобы выбрать один из 5 режимов. Над номером выбранного режима будет гореть индикатор, а индикаторы зоны массажа будут загораться, обозначая зону массажа.
4. Нажмите на кнопку «Интенсивность», чтобы выбрать одну из трех интенсивностей вибрации массажа. Над номером выбранной интенсивности будет гореть индикатор.
5. Вы можете настроить индивидуальный режим массажа. Нажмите на кнопки «Шея», «Спина», «Пояс», «Ноги», чтобы выбрать нужную зону массажа. Вы можете выбрать несколько зон. Индикатор зоны массажа будет гореть красным. Выберите подходящую интенсивность, нажав на кнопку «Интенсивность».
6. Вы можете включить подогрев во время массажа с помощью кнопки «Подогрев».

**Примечание.** Подогрев осуществляется в зоне лопаток. Процесс нагрева происходит постепенно. Потребуется около 4 минут, прежде чем вы почувствуете заметное повышение температуры.

7. Через 15 мин сработает автоотключение. Чтобы отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикация отключится.
8. После автоотключения вы можете нажать на кнопку «Вкл/Выкл» для включения массажера, если хотите продолжить использование.

**Примечание.** Сеанс массажа для одного человека рассчитан на 15 минут, не превышайте время использования массажером, чтобы не навредить своему здоровью.

9. После завершения работы массажера, отключите его от сети питания.

## Чистка и обслуживание

Необходимо поддерживать чистоту изделия, т. к. стирка массажера запрещена.

Перед чисткой убедитесь, что массажер отключен от сети электропитания. Допускается протирать поверхность массажера слегка влажной тканью. Не используйте растворители или агрессивные моющие средства. Не используйте массажер, если он влажный. Не сушите массажер на солнце. Не используйте для сушки фен.

## Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать на хранение, очистите поверхность массажера как указано в главе «Чистка и обслуживание». Массажер складывается для удобного хранения и поставляется с ремнем для фиксации в сложенном виде. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Не допускайте попадания жидкостей на массажер, пульт управления и его шнур, на блок питания и его шнур.

Не кладите тяжелые предметы на устройство во время хранения. Не перегибайте шнур питания и шнур от пульта управления, не обматывайте их вокруг устройства.

## Устранение неполадок

### Массажер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер не подключен к блоку питания	Подключите массажер к блоку питания через разъем на пульте управления
Массажер не включен	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,5 А
  - выход: =12 В, 1,2 А
2. Мощность: 14,4 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - массажера: III
4. Размер пульта управления: 180 × 60 мм
5. Длина шнура пульта управления: 0,9 м
6. Длина шнура блока питания: 1,8 м
7. Размер устройства: 590 × 30 × 1740 мм
8. Размер упаковки: 590 × 175 × 410 мм
9. Вес нетто: 1,5 кг
10. Вес брутто: 2,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение массажера, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей на массажер, пульт управления и его шнур, шнур питания не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур питания или шнур пульта управления. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, в область разъема шнура и органы управления.
14. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87