


**Удовольствие
в заботе!**

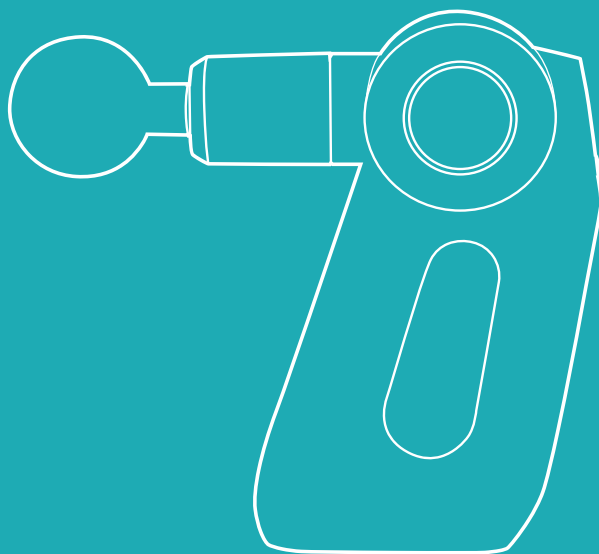

**Перкуссионный
массажер КТ-2965**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство перкуссионного массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	13

Общие сведения

ПеркуSSIONный (ударный) массажер Kitfort КТ-2965 поможет избавиться от мышечной усталости, боли и спазмов.

Воздействуя на мышцы, массажер устраняет стресс и затекание мышц. Ударный массажер позволяет восстановить свободу движений, избавиться от токсических продуктов обмена веществ и улучшает кровообращение. Прибор помогает подготовить мышцы к интенсивным нагрузкам, повысить производительность тренировок, а также расслабить мышцы после тренировки. Глубокое ударное воздействие на мышечную ткань и фасции повышает мобильность и восстанавливает работу опорно-двигательного аппарата.

Под действием ударной вибрации активизируется кровообращение и насыщение тканей кислородом, улучшается лимфодренаж и выведение токсических продуктов метаболизма. Использование направленной вибрации с определенной частотой и амплитудой не вызывает болезненных ощущений.

Каждая мышца имеет соединительнотканый футляр — фасцию, которая соединяет мышечные волокна и обеспечивает их движение. При сильном напряжении, травмах, больших нагрузках и с возрастом фасциальная ткань утрачивает эластичность, возникает «сцепление» фасции с мышцей. Массажер КТ-2965 способствует восстановлению функциональной подвижности и гибкости, благодаря чему можно расслабить группу спазмированных мышц.

Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью кнопки на задней стороне устройства. 5 уровней скорости позволяют подобрать комфортный, действенный массаж, как для нетренированного человека, так и для спортсмена.

Насадки разных видов предназначены для воздействия на группы мышц и отдельные мышцы. Пулевидная насадка применяется для «разбивания» триггеров, проработки тканей и точечного массажа стоп. Чрезмерное напряжение, резкие движения, растяжение провоцирует возникновение триггерных точек — плотных болезненных узлов в мышцах. Пулевидная насадка действует на проблемные зоны, прорабатывает триггеры и помогает расправить зажатые фасциальные волокна. Y-насадка используется для массажа мышц шеи, трапециевидной мышцы и мышц вдоль позвоночника. Плоская насадка отлично подходит для широких типов мышц. Круглая насадка более универсальная и подходит почти для любых групп мышц.


Модель КТ-2965 работает от аккумулятора, поэтому массажер можно брать с собой куда угодно: в спортзал, в офис, в поездку или использовать дома. Можно делать массаж, не снимая одежду. ПеркуSSIONный массажер позволит мышцам расслабиться, а также улучшит кровоток и избавит от боли.

Комплектация

1. Перкуссионный массажер — 1 шт.
2. Плоская насадка — 1 шт.
3. Пулевидная насадка — 1 шт.
4. Y-насадка — 1 шт.
5. Круглая насадка — 1 шт.
6. Шнур USB Type-C — 1 шт.
7. Сумка для хранения насадок — 1 шт.
8. Сумка для хранения массажера — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство перкуссионного массажера

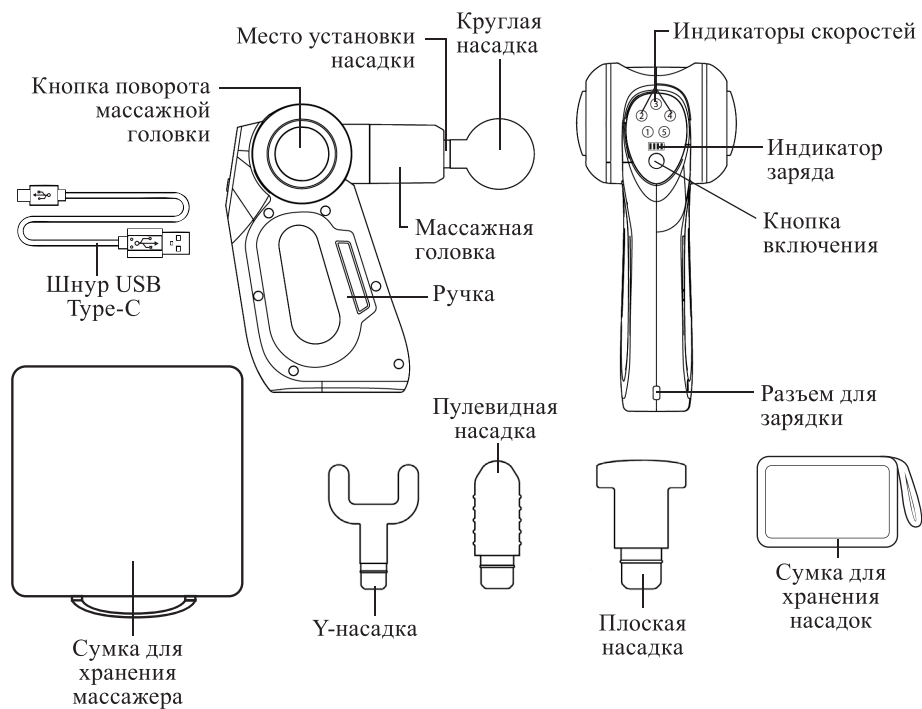

Нажмите и удерживайте **кнопку включения** для запуска работы устройства. Нажатия на кнопку переключают скорость работы от 1 до 5 скорости. Когда выбрана скорость, горит соответствующий ей **индикатор**. Нажатие на кнопку, когда установлена 5 скорость, переводит прибор в режим ожидания (горит только индикатор заряда). Чтобы вывести прибор из режима ожидания, снова нажмите на кнопку включения, будет установлена 1 скорость.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения.

Нажав и удерживая **кнопку поворота массажной головки** (находится с одной стороны прибора — справа от кнопки включения), вы можете настроить положение массажной головки под углом 90, 135 и 180 градусов к ручке. Если вы установите головку под другим углом, например 160°, массажная головка не зафиксирована и при массаже перейдет в одно из фиксированных положений (135 или 180 градусов). Чтобы понять, под нужным углом установлена массажная головка или нет, посмотрите на кнопку поворота массажной головки — она должна выступать за корпус.

Когда первое деление индикатора заряда мигает, это значит, что устройство разряжено.

Индикация заряда отображается следующим образом:

- мигает первое деление индикатора заряда — уровень заряда ниже 25%;
- первое деление индикатора заряда горит непрерывно, второе деление мигает — уровень заряда 25%;
- первое и второе деления индикатора заряда горят непрерывно, третье деление мигает — уровень заряда 50%;
- первое, второе и третье деления заряда горят непрерывно, четвертое деление мигает — уровень заряда 75%;
- все индикаторы горят непрерывно — прибор полностью заряжен.

Когда вы только подключили устройство к источнику питания, деления индикатора заряда поочередно загорятся, оповещая, что началась зарядка. Далее индикаторы будут гореть в соответствии с уровнем заряда.

Для зарядки устройства в комплекте предусмотрен **шнур USB Type-C**.

Вы можете убрать пулевидную насадку, плоскую насадку и Y-насадку в **сумку для хранения насадок**. В ней вы также можете хранить шнур USB Type-C. Чтобы массажер было удобно брать с собой и хранить, предусмотрена **сумка для хранения массажера**, куда убирается сам прибор, круглая насадка и сумка для хранения насадок. Чтобы убрать массажер в сумку, массажную головку необходимо перевести в положение, когда угол между массажной головкой и ручкой равен 90°.

Насадки

- **Плоская насадка** — предназначена для широких типов мышц, таких как ягодичная мышца и др.
- **Y-насадка** — предназначена для шеи, трапециевидной мышцы, и мышц вдоль позвоночника.
- **Круглая насадка** — универсальная, прорабатывает почти все типы мышц.
- **Пулевидная насадка** — для точечного массажа.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство и насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Продезинфицируйте насадки: их можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или хлоргексидине.

Зарядите устройство. Перед первым применением ознакомьтесь со всеми рекомендациями и противопоказаниями к применению массажера из раздела «Меры предосторожности по применению».

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ± 5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Вставьте шнур USB Type-C в разъем для зарядки на массажере, а затем подключите шнур к источнику питания.

Когда первое деление индикатора заряда мигает, это значит, что устройство разряжено.

Индикация заряда отображается следующим образом:

- мигает первое деление индикатора заряда — уровень заряда ниже 25%;
- первое деление индикатора заряда горит непрерывно, второе деление мигает — уровень заряда 25%;
- первое и второе деления индикатора заряда горят непрерывно, третье деление мигает — уровень заряда 50%;
- первое, второе и третье деления заряда горят непрерывно, четвертое деление мигает — уровень заряда 75%;
- все индикаторы горят непрерывно — прибор полностью заряжен.

Когда вы только подключили устройство к источнику питания, деления индикатора заряда поочередно загорятся, оповещая, что началась зарядка. Далее индикаторы будут гореть в соответствии с уровнем заряда.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечания. Во время зарядки прибор включить нельзя. Чтобы включить массажер, сначала отключите его от источника питания.

Задняя часть устройства, где находятся кнопка включения и индикаторы, может греться во время зарядки устройства — это нормально и не является неисправностью.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от массажера.

От одной зарядки прибор работает до 6 часов в зависимости от используемой скорости и давления на массажер.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его наполовину каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, затем заряжайте примерно 2 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
2. Выберите необходимую насадку. Установите насадку до упора в место установки насадки.
3. Нажав и удерживая кнопку поворота массажной головки, вы можете настроить положение массажной головки под углом 90, 135 и 180 градусов к ручке. Если вы установите головку под другим углом, например 160°, массажная головка не зафиксируется и при массаже перейдет в одно из фиксированных положений (135 или 180 градусов). Чтобы понять, под нужным углом установлена массажная головка или нет, посмотрите на кнопку поворота массажной головки — она должна выступать за корпус.
4. Нажмите и удерживайте кнопку включения. Устройство начнет работу на первой скорости, индикатор 1 скорости будет гореть. Также будут гореть деления индикатора заряда: количество делений зависит от уровня заряда устройства.
5. Установите скорость работы одинарными нажатиями на кнопку включения. У устройства 5 скоростей работы.

Внимание! Если вы только начинаете пользоваться массажером, устанавливайте 1 или 2 скорость работы. Проследите за реакцией организма на массаж. После нескольких процедур массажа на небольшой скорости, вы можете попробовать увеличить скорость.

Примечание. Нажатие на кнопку, когда установлена 5 скорость, переводит прибор в режим ожидания (горит только индикатор заряда). Чтобы вывести прибор из режима ожидания, снова нажмите на кнопку включения, будет установлена 1 скорость.

6. Прислоните насадку к области тела, на которой собираетесь производить массаж. Плавно и медленно двигайтесь вдоль мышцы, не надавливая. Массаж каждой зоны должен длиться от 15 до 60 секунд, а общее время процедуры — не более 10 минут.

Примечание. По истечении 15 минут у массажера сработает автоотключение. Для продолжения работы повторно запустите устройство.

7. После завершения массажа нажмите и удерживайте кнопку включения: устройство отключится.

Внимание! Не используйте массажер в области сердца, на лице и голове, передней поверхности шеи, в точках пульсации, костных выступах, непосредственно на позвоночнике, суставах и слизистых оболочках.

Не давите слишком сильно на кожу во время массажа. При дискомфорте во время массажа прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, будьте осторожны при пользовании массажером и перед полноценным массажем проследите за реакцией кожи и сосудов.

Внимание! Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью: ванне, бане и сауне. Следите, чтобы кожа лица и тела была сухой, берите массажер только сухими руками.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление.

Советы

Рекомендации для массажа различных групп мышц:

Ягодичные мышцы

- Время воздействия: 30–60 секунд
- Количество повторов: 4 раза



Мышцы бедра

- Время воздействия: 20–45 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы голени

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы плеч и предплечий

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы спины

- Время воздействия: 30–60 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Триггерная точка

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 1–2 раза

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Время проведения массажа зависит от ощущений человека, в среднем от 3 до 10 минут.

Не прижимайте массажер сильно к частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно. Каждый сеанс должен длиться не более 10 минут.

От одной зарядки прибор работает до 6 часов в зависимости от используемой скорости и давления на массажер.

Чистка и обслуживание

Протирайте устройство и насадки мягкой влажной, а затем сухой тканью. Не используйте моющие средства.

Продезинфицируйте насадки: их можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или хлоргексидине.

Чистку следует производить после каждого использования, т.к. влага, кожный жир и пот могут привести к повреждению поверхности насадок.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадание жидкостей на органы управления, в место установки насадок, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. При длительном хранении рекомендуется убрать насадки и шнур USB Type-C в сумку для хранения насадок, затем сумку, круглую насадку и массажер убрать в сумку для хранения массажера. Чтобы убрать массажер в сумку, массажную головку необходимо перевести в положение, когда угол между массажной головкой и ручкой равен 90°.

Аккумулятор массажера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 2 часа. Уровень заряда при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте массажер наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните массажер при температуре от 5 до 40 °С.

Устранение неполадок

Устройство не работает, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Вы не нажали и не удерживали кнопку включения	Для запуска устройства необходимо нажать и удерживать кнопку включения
Закончился 15 минутный сеанс массажа и прибор автоматически выключился	После 15 минут срабатывает автоотключение. Для продолжения работы повторно запустите устройство
Разрядился аккумулятор	Зарядите устройство
Индикаторы скоростей не горят, индикатор заряда горит — прибор в режиме ожидания	Нажатие на кнопку включения, когда установлена 5 скорость, переводит прибор в режим ожидания (горит только индикатор заряда). Чтобы вывести прибор из режима ожидания, снова нажмите на кнопку включения, будет установлена 1 скорость

Устройство не заряжается, индикатор заряда не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый источник питания	Используйте источник питания, чтобы на выходе было ≈ 5 В, 2 А
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите и включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Не до конца подключили шнур USB Type-C в разъем	Вставьте шнур USB Type-C до конца



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C —5 В, 2 А
2. Мощность: 75 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 11,1 В, 2 А*ч (22,2 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость ударов:
 - на первой скорости: 1800 уд/мин
 - на второй скорости: 2000 уд/мин
 - на третьей скорости: 2200 уд/мин
 - на четвертой скорости: 2600 уд/мин
 - на пятой скорости: 3000 уд/мин
6. Время работы: до 6 ч
7. Время зарядки: 4 ч
8. Длина шнура: 0,9 м
9. Размер устройства: 229 × 173 × 105 мм
10. Размер упаковки: 287 × 276 × 115 мм
11. Вес нетто: 1,3 кг
12. Вес брутто: 1,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей на массажер или шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на массажере, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C.
6. Переносите массажер за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без насадок. Это может привести к повреждению устройства.

11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до движущихся частей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки, на органы управления, шнур USB Type-C и в место установки насадок.
18. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
21. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем от массажера.
22. Не подносите включенный прибор к области сердца, лицу и голове, передней поверхности шеи, к точкам пульсации, костным выступам, непосредственно к позвоночнику, суставам и слизистым оболочкам.
23. Не используйте устройство во время передвижения в транспортном средстве.
24. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.

IM-2



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87