



СТУЛ-СИДЕНЬЕ ДЛЯ КУПАНИЯ В ВАННОЙ И ДУШЕ

BRADEx
Health & Beauty

Артикул KZ 0536

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Стул-сиденье для купания в ванной и душе отличается регулируемыми ножками и устойчивостью даже на скользкой поверхности. Подойдет для купания людей в преклонном возрасте и с ограниченными возможностями.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Регулируемая высота ножек от 39 до 52 см.
- Удобная изогнутая форма сидения.
- Дренажные отверстия для стока воды.
- Нескользкие резиновые накладки на ножках стула.
- Ручки по бокам сиденья для переноски.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните вдали от источников возгорания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Перед применением проверьте правильность сборки и устойчивость стула.

Проверьте, чтобы все ножки были одной высоты.

Если какие-то части стула повреждены, прекратите эксплуатацию.

Не предназначен для купания грудных детей.

Максимальная нагрузка – 100 кг.

Не позволяйте детям играть со стулом, становиться на сиденье ногами, прыгать или менять высоту ножек.

СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ:

сиденье

5 винтов

5 шайб

2 опоры сиденья, в собранном виде – 4 ножки

4 удлинителя опор с отверстиями

4 кнопки-фиксатора

СБОРКА:

Положите сиденье стороной с углублением в форме X вверх.

Положите нижнюю опору на сиденье от нижнего левого угла к правому верхнему углу.

Совместите отверстия и вставьте 2 винта с шайбами по краям опоры.

Закрутите винты до упора.

Положите 2 опоры сверху и также совместите винты и отверстия, закрутите до упора.

Закрутите винт с шайбой в центре пересечения опор.

Наденьте удлинители опор, совместив нумерацию на ножке от 1 до 6 и кнопки-фиксаторы.

Все ножки должны быть зафиксированы на одном уровне (в соответствии с нумерацией на ножках).

Проверьте, чтобы кнопки-фиксаторы входили в отверстия целиком и прочно держали удлинители ножек.

Наденьте резиновые накладки на ножки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Соберите стул согласно инструкции.

Поставьте стул в ванну или в душевую кабину/под душ.

Удостоверьтесь, что стул достаточно устойчив.

Садитесь в центр стула, при необходимости придерживайте ручки стула руками.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ СТУЛА:

Если стул используется несколькими людьми, после купания необходимо провести санитарную обработку сидения.

При загрязнении промойте губкой с моющим средством, смывать водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ПРОДУКЦИЯ НЕ ИМЕЕТ САНИТАРНОГО ОСНАЩЕНИЯ, ВСТРОЕННОГО ИЛИ СЪЁМНОГО РЕЗЕРВУАРА, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ РЕАБИЛИТАЦИИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: алюминий, полиуретан

Цвет: белый

Размер: высота ножек: 39-52 см.

Размер сидения: 51х31 см.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Для ванн шириной от 43 см.

Комплектация: сиденье – 1 шт., винт – 5 шт., опоры сиденья – 2 шт.,

удлинители опор – 4 шт., инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824,

fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва,

ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель:

Джежян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустри-

альная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938,

e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Дату производства смотреть на упаковке.

Срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.



BRADEXRUSSIA



BRADEXMOSCOW

EAC



Перед началом эксплуатации
ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных
для детей и животных