

В профилактической обуви ORTUZZI применена инновационная тест-система походки, которая позволяет провести самостоятельную диагностику позиции стоп ребёнка и выявить возможные отклонения на ранней стадии.

Как это работает

Подошва обуви поделена на 10 сегментов. После 14 дней носки часть из них естественным образом стирается. И именно по ним можно определить то или иное отклонение в формировании стопы.





www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

- **Сегмент 1.** Сигнализирует о наличии дефекта ступней и/или коленей. Более точные выводы сделает врач.
- **Сегмент 2.** Наблюдается динамика развития начальных стадий плоскостопия.
- **Сегмент 3.** Существует дефект ступней и/или коленей. Необходима консультация специалиста!
- **Сегмент 4.** Стопы ребёнка здоровы, патологий не выявлено.
- **Сегменты 5, 6, 7.** Имеет место плоскостопие (плоско-вальгусная деформация стоп). Необходима консультация квалифицированного ортопеда!
- **Сегменты 8, 9, 10.** Наблюдается стаптывание стопы наружу — косолапость (варусная деформация). Необходима консультация квалифицированного ортопеда!