



## Инструкция к электронному алкотестеру 2320



Алкотестер – это электронный прибор, предназначенный для определения содержания уровня алкоголя в крови человека по выдыхаемому воздуху. Этиловый полупроводниковый сенсор алкотестера обеспечивает практически мгновенное получение информации об уровне содержания алкоголя в крови.

### Как им пользоваться?

Перед началом измерения не курите и не ешьте в течение 20 минут.

Для подтверждения результата можно провести повторный тест, но не раньше, чем через 3 минуты.

Для включения алкотестера, необходимо нажать и удерживать кнопку POWER (до 10 секунд). Прибор уведомит пользователя о включении миганием светодиодов — красного, желтого и зеленого цветов. После того, как останется гореть только зеленый индикатор, необходимо поднести алкотестер – брелок ко рту и сделать максимально возможный выдох на отверстие для продувки в течение 3-5 секунд, при этом, кнопку POWER не отпускаем. В зависимости от уровня содержания алкоголя в крови вашего организма, на алкотестере, через 4 – 6 секунд, загорится один из индикаторов:

- **красный** — уровень алкоголя в крови превышает 0,05%;
- **желтый** — уровень алкоголя в крови от 0,02% до 0,05%;
- **зеленый** — уровень алкоголя в крови — менее 0,02%.

В данном алкотестере встроен фонарик (оранжевый светодиод), что делает этот **подарок, еще более практичным** (включается специальным переключателем – находится на боковой панели алкометра), а благодаря специальному кольцу, его легко можно прикрепить к автомобильному ключу и тогда, он всегда будет под рукой.

Питание: 2 батарейки типа AAA (не входят в комплект).

Материал: пластик, электронные компоненты.

Вес: 26 г.

Размер товара: 7,5 x 3,5 x 1,5 см.

В комплект входит инструкция по эксплуатации.